

# DIGITALE STATUSCODES

## LADESYSTEM-CODES NORMALER BETRIEBSZUSTAND

1

01

### **NORMAL – Batterie lädt**

Ladegerät angeschlossen und betriebsbereit

- Normaler Betrieb

04

### **NORMAL – Batterie ist vollständig aufgeladen.**

Ladegerät angeschlossen und betriebsbereit – Batterie hat maximale Ladung

- Normaler Betrieb

05

### **FEHLFUNKTION – Batteriefehler**

Ladegerät lädt nicht obwohl angeschlossen  
– Batterieverbinding oder Batterie defekt

- Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Acorn-Händler

## NORMALBETRIEB-CODES NORMALER BETRIEBSZUSTAND

2

■

### **NORMAL – Stand-By-Betrieb**

Keine Statusanzeige. Lift ist entweder auf Stand-By oder bekommt keinen Strom

- Prüfen Sie, daß der Batterieschalter in der 'ON'-Position ist
- Benutzen Sie das Bedienelement um den Lift aus dem Stand-By 'aufzuwecken'.

A1 )))

### **NORMAL – Keine Ladung**

LIFT GIBT PIEPTON VON SICH  
Lift ist nicht auf Ladestation geparkt und erhält keine Ladung

- Benutzen Sie das Bedienelement und fahren Sie den Lift auf eine Ladestation
- Prüfen Sie, daß der Strom nicht abgeschaltet ist

A2

### **NORMAL – Lift fährt aufwärts**

Lift ist in Benutzung und fährt aufwärts per Bedienelement

- Normaler Betrieb

A3

### **NORMAL – Lift fährt abwärts**

Lift ist in Benutzung und fährt abwärts per Bedienelement

- Normaler Betrieb

# DIGITALE STATUSCODES

2

## NORMALBETRIEB-CODES NORMALER BETRIEBZUSTAND

A4

**NORMAL – Lift fährt aufwärts per Fernbedienung** Lift ist in Benutzung und fährt aufwärts per Fernbedienung

- Normaler Betrieb

A5

**NORMAL – Lift fährt abwärts per Fernbedienung** Lift ist in Benutzung und fährt abwärts per Fernbedienung

- Normaler Betrieb

3

## FEHLER-CODES LIFT IST NICHT BETRIEBSFÄHIG

E1

**NORMAL – Sicherheitssensor ist aktiviert worden**  
Bergseitiger Fußplatten-Sensor ist aktiviert worden.

- Prüfen Sie den bergseitigen Fußplatten-Sensor

E2

**NORMAL – Sicherheitssensor ist aktiviert worden**  
Talseitiger Fußplatten-Sensor ist aktiviert worden

- Prüfen Sie den talseitigen Fußplatten-Sensor

E3

**NORMAL – Sicherheitssensor ist aktiviert worden**  
Bergseitiger Fahreinheits-Sensor ist aktiviert worden.

- Prüfen Sie den bergseitigen Sicherheitssensor an der Fahreinheit

E4

**NORMAL – Sicherheitssensor ist aktiviert worden**  
Talseitiger Fahreinheits-Sensor ist aktiviert worden.

- Prüfen Sie den talseitigen Sicherheitssensor an der Fahreinheit

E5

**NORMAL – Sitz in falscher Position**  
Der Sitz ist nicht in Fahrtposition

- Drehen Sie den Sitz in die Fahrtposition bis er einrastet

E8

**NORMAL – Batterie schwach**  
Batterie muß aufgeladen werden

- Benutzen Sie das Bedienelement und fahren Sie den Lift auf eine Ladestation

E9

**NORMAL – Schlüsselschalter ist abgeschaltet**  
Schlüsselschalter ist in der 'OFF' Position

- Prüfen sie, daß der Schlüssel im Schloß steckt und in der 'ON' Position ist

# DIGITALE STATUSCODES



**BITTE BEACHTEN: WENN MEHRERE VON DEN OBIGEN FEHLERN AUF EINMAL AUFTRETEN (z.B. der Sitz ist nicht eingerastet UND der Schlüsselschalter ist in der 'OFF'-Position) , KÖNNTE EINER VON DEN FOLGENDEN FEHLERCODES ANGEZEIGT WERDEN.**

## HARDWARE FEHLER-CODES

LIFT IST NICHT BETRIEBSFÄHIG

4

H1

### NORMAL – Mehrfach-Fehler

Mehr als ein Fehler ist auf einmal aufgetreten

- Prüfen Sie, ob mehr als ein Fehler von den oben genannten Fehlern aufgetreten ist und, wenn möglich, beheben Sie diese.

H2

### NORMAL – Mehrfach-Fehler

Mehr als ein Fehler ist auf einmal aufgetreten

- Berufen Sie sich auf die oben genannten Fehlercodes wenn der Lift nach Behebung nun einen anderen Fehlercode anzeigt.

H3

### NORMAL – Mehrfach-Fehler

Mehr als ein Fehler ist auf einmal aufgetreten

- Wenn dies den Fehler nicht behebt, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

H4

### FEHLER – Sicherheitsvorrichtung

Mehr als ein Fehler ist auf einmal aufgetreten, dies hat einen Fehler in den Sicherheitsvorrichtungen verursacht

- Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

## SCHWERSTFEHLER-CODES

LIFT IST NICHT BETREIBSFÄHIG

5

F1

### FEHLER – Relais-Fehler

- Stellen Sie den Treppenlift neu ein (Schalten Sie ihn für etwa 30 Sekunden ab)
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

**SCHWERSTFEHLER-CODES Fortsetzung nächste Seite**

# DIGITALE STATUSCODES

5

## SCHWERSTFEHLER-CODES

LIFT IST NICHT BETRIEBSFÄHIG

F2

**FEHLER - Bremsenfehler**

- Stellen Sie den Treppenlift neu ein (Schalten Sie ihn für etwa 30 Sekunden ab).
- Fahren Sie den Treppenlift auf eine der Ladestationen und lassen Sie ihn für etwa eine Stunde aufladen.
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

F3

**FEHLER - Motorfehler**

- Stellen Sie den Treppenlift neu ein (Schalten Sie ihn für etwa 30 Sekunden ab)
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

F4

**FEHLER - Motorüberlastung**

- Stellen Sie den Treppenlift neu ein (Schalten Sie ihn für etwa 30 Sekunden ab)
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

F5

**FEHLER – Batteriefehler**

- Fahren Sie den Treppenlift auf die UNTERE Ladestation und lassen Sie ihn laden

F6

**FEHLER – Schienenendstop überfahren**

- Benutzen Sie das Handdrehrad um den Lift nach oben oder unten zu bewegen (siehe Handdrehrad)
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler

F7

**FEHLER - Fangbremse**

- Benutzen Sie das Handdrehrad um den Lift nach OBEN zu bewegen – dies stellt die Fangbremse neu ein (siehe Handdrehrad)

F8

**FEHLER - Systemfehler**

- Stellen Sie den Treppenlift neu ein (Schalten Sie ihn für etwa 30 Sekunden ab)
- Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten ACORN-Händler