

CODICI DEL DISPLAY DIGITALE

CODICI DI RICARICA

IL MONTASCALE FUNZIONA NORMALMENTE

1

01

NORMALE – La batteria si sta ricaricando

Il caricabatteria è collegato e funziona correttamente

- Il montascale funziona correttamente

04

NORMALE – La batteria è completamente carica

Il caricabatteria è collegato ma non carica – la batteria è alla massima capacità di carica

- Il montascale funziona correttamente

05

FAULT – Guasto della batteria

Il caricabatteria è collegato ma non carica – la batteria è guasta o non è presente

- Rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per l'assistenza tecnica

CODICI DI FUNZIONAMENTO STANDARD

IL MONTASCALE FUNZIONA NORMALMENTE

2

■

NORMALE – Alimentazione interrotta / Modalità sospensione

Il display è spento. Il montascale non riceve energia oppure si trova nella modalità di sospensione.

- Controllare che l'interruttore di alimentazione si trovi nella posizione di ACCENSIONE.
- Azionare il comando direzionale a levetta per riattivare il montascale dalla modalità 'SOSPENSIONE'.

A1)))

NORMALE – Assenza di ricarica

IL MONTASCALE EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO
Il montascale non è stato parcheggiato su un punto di ricarica e non sta ricevendo alcuna carica.

- Azionare il comando direzionale a levetta e portare il montascale su un punto di ricarica
- Controllare che l'alimentazione di rete non sia stata disinserita

A2

NORMALE – Il montascale risale

Il montascale è in servizio e sta risalendo la scala. È stato azionato il comando a levetta sul bracciolo.

- Il montascale funziona correttamente

A3

NORMALE – Il montascale scende

Il montascale è in servizio e sta scendendo lungo la scala. È stato azionato il comando a levetta sul bracciolo.

- Il montascale funziona correttamente

CODICI DEL DISPLAY DIGITALE

2

CODICI DI FUNZIONAMENTO STANDARD

IL MONTASCALE FUNZIONA NORMALMENTE

A4

NORMALE – Il montascale risale (telecomando)

Il montascale è in servizio e sta risalendo la scala. È stato azionato il telecomando.

- Il montascale funziona correttamente

A5

NORMALE – Il montascale scende (telecomando)

Il montascale è in servizio e sta scendendo lungo la scala. È stato azionato il telecomando.

- Il montascale funziona correttamente

3

CODICI DEGLI ERRORI DI FUNZIONAMENTO

IL MONTASCALE NON FUNZIONA

E1

NORMALE – Bordo di sicurezza attivato

È stato attivato il bordo di sicurezza SUPERIORE del poggiapiedi

- Controllare che il bordo di sicurezza SUPERIORE del poggiapiedi non sia a contatto con un ostacolo

E2

NORMALE – Bordo di sicurezza attivato

È stato attivato il bordo di sicurezza INFERIORE del poggiapiedi

- Controllare che il bordo di sicurezza INFERIORE del poggiapiedi non sia a contatto con un ostacolo

E3

NORMALE – Bordo di sicurezza attivato

È stato attivato il bordo di sicurezza SUPERIORE del carrello

- Controllare che il bordo di sicurezza SUPERIORE del carrello non sia a contatto con un ostacolo

E4

NORMALE – Bordo di sicurezza attivato

È stato attivato il bordo di sicurezza INFERIORE del carrello

- Controllare che il bordo di sicurezza INFERIORE del carrello non sia a contatto con un ostacolo

E5

NORMALE – Poltroncina non in posizione

La poltroncina del montascale non si trova nella posizione di marcia

- Riportare la poltroncina nella posizione di marcia

E8

NORMALE – Batteria scarica

È necessario ricaricare la batteria

- Azionare il comando direzionale a levetta e portare il montascale su un punto di ricarica

E9

NORMALE – Interruttore a chiave disinserito

L'interruttore a chiave si trova nella posizione di SPEGNIMENTO

- Controllare che la chiave sia inserita e ruotata nella posizione di ACCENSIONE

CODICI DEL DISPLAY DIGITALE



NOTA: SE SI VERIFICANO CONTEMPORANEAMENTE PIÙ DI UNO DEI PRECEDENTI 'ERRORI' DI FUNZIONAMENTO (ad es. se la poltroncina non è nella posizione di marcia E l'interruttore a chiave si trova nella posizione di spegnimento) POTREBBE ESSERE VISUALIZZATO UNO DEI SEGUENTI CODICI DI GUASTO HARDWARE

CODICI DI GUASTO HARDWARE

IL MONTASCALE NON FUNZIONA

4

H1

NORMALE – Errore operativo multiplo

Si è verificato più di un errore

H2

NORMALE – Errore operativo multiplo

Si è verificato più di un errore

H3

NORMALE – Errore operativo multiplo

Si è verificato più di un errore

H4

GUASTO – Guasto di un dispositivo di sicurezza

Si è verificato più di un errore, dando luogo a un guasto di un dispositivo di sicurezza

- Verificare che non siano presenti più di uno dei guasti di cui alla sezione 3 e, se possibile, adottare il rimedio opportuno

- Se dopo aver controllato e risolto il problema compare un altro codice, consultare la sezione 3

- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

- Rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per l'assistenza tecnica

CODICI DEGLI ERRORI FATALI

IL MONTASCALE NON FUNZIONA

5

F1

GUASTO – Guasto del relè

- Ripristinare il montascale (disinserire l'alimentazione elettrica per 30 secondi)

- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

CODICI DEGLI ERRORI FATALI continua alla pagina seguente

CODICI DEL DISPLAY DIGITALE

5

CODICI DEGLI ERRORI FATALI IL MONTASCALE NON FUNZIONA

F2

GUASTO – Guasto del freno

- Ripristinare il montascale (disinserire l'alimentazione elettrica per 30 secondi)
- Portare il montascale fino a punto di ricarica e lasciarlo caricare per un'ora
- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

F3

GUASTO – Guasto del motore

- Ripristinare il montascale (disinserire l'alimentazione elettrica per 30 secondi)
- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

F4

GUASTO – Sovraccorrente del motore

- Ripristinare il montascale (disinserire l'alimentazione elettrica per 30 secondi)
- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

F5

GUASTO – Guasto della batteria

- Far DISCENDERE il montascale fino a un punto di ricarica e lasciarlo caricare

F6

GUASTO – Superamento limite finale

- Azionare manualmente in montascale per farlo risalire o scendere (consultare azionamento manuale)
- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza

F7

GUASTO – Interruttore OSG

- Azionare manualmente il montascale facendolo RISALIRE per ripristinare l'interruttore OSG (consultare azionamento manuale)

F8

GUASTO – Blocco del sistema

- Ripristinare il montascale (disinserire l'alimentazione elettrica per 30 secondi)
- Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio rivenditore Acorn autorizzato per ulteriore assistenza