

# DIGITALE SCHERMCODES

## LAADCODES

DE LIFT WERKT NORMAAL

1

### NORMAAL - de batterij wordt opgeladen

De lader is aangesloten en werkt goed

- De lift werkt normaal

### NORMAAL - de batterij is volledig opgeladen

De lader is aangesloten maar laadt niet. De batterij is helemaal vol

- De lift werkt normaal

### STORING - batterijstoring

De lader is aangesloten maar laadt niet. De batterij kan niet gevonden worden of is defect

- Neem contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

## STANDAARD GEBRUIKSCODES

DE LIFT WERKT NORMAAL

2

### NORMAAL - geen stroom / slaapstand

Geen weergave op het scherm. De traplift ontvangt geen stroom of staat in de slaapstand

- Controleer of de hoofdschakelaar aan staat
- Activeer de bedieningshendel om de traplift uit de 'slaapstand' te waken

### NORMAAL - niet geladen

TRAPLIFT PIEPT

De traplift is niet op een laadpunt geparkeerd en wordt niet opgeladen

- Activeer de bedieningshendel en rij de traplift naar een laadpunt toe
- Controleer of de elektrische hoofdleiding niet uitgeschakeld is

### NORMAAL - lift gaat naar boven

De traplift werkt en gaat naar boven. De bedieningshendel op de armleuning is geactiveerd

- De lift werkt normaal

### NORMAAL - lift gaat naar beneden

De traplift werkt en gaat naar beneden. De bedieningshendel op de armleuning is geactiveerd

- De lift werkt normaal

# DIGITALE SCHERMCODES

2

## STANDAARD GEBRUIKSCODES

DE LIFT WERKT NORMAAL

A4

**NORMAAL - lift gaat naar boven (afstandsbediening)** De traplift werkt en gaat naar boven. De afstandsbediening is geactiveerd

- De lift werkt normaal

A5

**NORMAAL - lift gaat naar beneden (afstandsbediening)** De traplift werkt en gaat naar beneden. De afstandsbediening is geactiveerd

- De lift werkt normaal

3

## GEBRUIKSSTORINGSCODES

TRAPLIFT WERKT NIET

E1

**NORMAAL - veiligheidsrand geactiveerd**  
Bovenste veiligheidsrand voetsteun is geactiveerd

- Controleer de bovenste veiligheidsrand van de voetsteun op obstructies

E2

**NORMAAL - veiligheidsrand geactiveerd**  
Onderste veiligheidsrand voetsteun is geactiveerd

- Controleer de onderste veiligheidsrand van de voetsteun op obstructies

E3

**NORMAAL - veiligheidsrand geactiveerd**  
Bovenste veiligheidsrand van de toestel is geactiveerd

- Controleer de bovenste veiligheidsrand van de toestel op obstructies

E4

**NORMAAL - veiligheidsrand geactiveerd**  
Onderste veiligheidsrand van de toestel is geactiveerd

- Controleer de onderste veiligheidsrand van het toestel op obstructies

E5

**NORMAAL - stoel niet op zijn plaats**  
De stoel van de traplift staat niet in de rijstand

- Draai de stoel terug in de rijstand

E8

**NORMAAL - batterij bijna leeg**  
De batterij moet opgeladen worden

- Activeer de bedieningshendel en rij de traplift naar een laadpunt

E9

**NORMAAL - sleutelschakelaar uit**  
De sleutelschakelaar staat uit

- Controleer of de sleutel in de schakelaar zit en de schakelaar aan staat

# DIGITALE SCHERMCODES



**LET OP! ALS MEER DAN EEN VAN DE VOORGAANDE 'GEBRUIKSSTORINGEN' TEGELIJK OPTREDEN (bijv. de stoel staat niet op zijn plaats EN de sleutelschakelaar staat uit) DAN VERSCHIJNT WELLIJCH EEN VAN DE VOLGENDE HARDWARESTORINGSCODES**

## HARDWARESTORINGSCODES

TRAPLIFT WERKT NIET

4

H1

### **NORMAAL - meerdere gebruiksstoringsen**

Er zijn meerdere storingsen opgetreden

- Controleer of er meerdere storingsen uit deel 3 opgetreden zijn en herstel deze indien mogelijk

H2

### **NORMAAL - meerdere gebruiksstoringsen**

Er zijn meerdere storingsen opgetreden

- Raadpleeg deel 3 als na het controleren en oplossen van de storing een andere code verschijnt

H3

### **NORMAAL - meerdere gebruiksstoringsen**

Er zijn meerdere storingsen opgetreden

- Als u de storing niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

H4

### **STORING - storing in veiligheidsinrichting**

Er zijn meerdere storingsen opgetreden waardoor een storing in de veiligheidsinrichting opgetreden is

- Neem contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

## FATALE STORINGSCODES

TRAPLIFT WERKT NIET

5

F1

### **STORING - relaisstoring**

- Stel de traplift terug (30 seconden lang uit zetten)
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

**FATALE STORINGSCODES** vervolg op ommezijde

# DIGITALE SCHERMCODES

5

## FATALE STORINGSCODES

TRAPLIFT WERKT NIET

F2

**STORING - remstoring**

- Stel de traplift terug (30 seconden lang uit zetten)
- Rijd de traplift naar een laadpunt en laat hem daar 1 uur lang opladen
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

F3

**STORING - motorstoring**

- Stel de traplift terug (30 seconden lang uit zetten)
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

F4

**STORING - motor overbelast**

- Stel de traplift terug (30 seconden lang uit zetten)
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

F5

**STORING - batterijstoring**

- Rijd de traplift naar **BENEDEN** naar een laadpunt en laat hem daar opladen

F6

**STORING - te ver gereden**

- Wikkel de traplift met de hand naar boven of naar beneden (zie 'met de hand wikkelen')
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp

F7

**STORING - snelheidsbegrenzer**

- Wikkel de traplift met de hand naar **BOVEN** om de snelheidsbegrenzer terug te stellen (zie 'met de hand wikkelen')

F8

**STORING - systeem geblokkeerd**

- Stel de traplift terug (30 seconden lang uit zetten)
- Als de storing hiermee niet opgelost is, neem dan contact op met uw bevoegde Acorn-dealer voor hulp