

CÓDIGOS ECRÃ DIGITAL

CÓDIGOS DE CARGA ELEVADOR FUNCIONA EM NORMAL

1

NORMAL - Bateria em carga

Carregador ligado e a funcionar devidamente

- Elevador funciona normalmente

NORMAL - Bateria completamente carregada

Carregador ligado mas não em carga - bateria na capacidade de carga máxima

- Elevador funciona normalmente

FALHA - Falha de bateria

Carregador ligado mas não em carga - bateria não detectada ou apresenta falha

- Contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência

CÓDIGOS OPERAÇÃO PADRÃO ELEVADOR FUNCIONA EM NORMAL

2

NORMAL – Sem carga/Modo SLEEP

Sem visualização apresentada. Elevador não recebe alimentação ou encontra-se no modo SLEEP.

- Verifique se o interruptor de alimentação se encontra na posição ON (ligado)
- Active o manípulo direccional para retirar a cadeira elevador de escadas do modo 'SLEEP'

NORMAL - Sem carga

ELEVADOR EMITE SINAIS SONOROS
Elevador estacionado fora de um ponto de carga e não recebe carga.

- Active o manípulo direccional e direcione a cadeira elevador de escadas para um ponto de carga
- Verifique se o cabo de alimentação não foi desligado

NORMAL - Elevador em ascensão

Elevador em operação e em ascensão. A alavanca articulada do apoio para braço foi activada.

- Elevador funciona normalmente

NORMAL - Elevador em descida

Elevador em operação e em descida. A alavanca articulada do apoio para braço foi activada.

- Elevador funciona normalmente

CÓDIGOS ECRÃ DIGITAL

2

CÓDIGOS OPERAÇÃO PADRÃO

ELEVADOR FUNCIONA EM NORMAL

A4

NORMAL - Elevador em ascensão (remoto)

Elevador em operação e em ascensão. O controlo remoto foi activado.

- Elevador funciona normalmente

A5

NORMAL - Elevador em descida (remoto)

Elevador em operação e em descida. O controlo remoto foi activado.

- Elevador funciona normalmente

3

CÓDIGOS DE ERRO DE FUNCIONAMENTO

ELEVADOR NÃO FUNCIONA

E1

NORMAL - Margem de segurança activada

Margem de segurança UP (para cima) de apoio para pés foi activada

- Verifique se existe obstrução da margem de segurança UP (para cima) de apoio para pés

E2

NORMAL - Margem de segurança activada

Margem de segurança DOWN (para baixo) de apoio para pés foi activada

- Verifique se existe obstrução da superfície de margem DOWN (para baixo) de apoio para pés

E3

NORMAL - Margem de segurança activada

Margem de segurança UP (para cima) de transporte foi activada

- Verifique se existe obstrução da margem de segurança UP (para cima) de transporte

E4

NORMAL - Margem de segurança activada

Margem de segurança DOWN (para baixo) de transporte foi activada

- Verifique se existe obstrução da margem de segurança DOWN (para baixo) de transporte

E5

NORMAL - Assento for a da posição

O assento da cadeira elevadora não está na posição de marcha

- Volte a colocá-lo na posição de marcha

E8

NORMAL - Bateria fraca

Bateria necessita de carga

- Active o interruptor da alavanca articulada direccional e direcione a cadeira elevadora para um ponto de carga

E9

NORMAL - Interruptor de chave desligado

Interruptor de chave encontra-se na posição OFF (desligado)

- Verifique se a chave está inserida e na posição ON (ligado)

CÓDIGOS ECRÃ DIGITAL



NOTA: SE MAIS DE UM DOS ANTERIORES 'ERROS' DE FUNCIONAMENTO SURGIREM CONJUNTAMENTE (p. ex. assento fora da posição E o interruptor de chave está na posição OFF (desligado)) ENTÃO UM DOS SEGUINTESS CÓDIGOS DE FALHA DE HARDWARE PODE SER VISUALIZADO

CÓDIGOS DE FALHA DE HARDWARE

ELEVADOR NÃO FUNCIONA

4

H1

NORMAL - Erro de funcionamento múltiplo

Ocorreu mais de um erro

- Verifique se não ocorreu mais de uma falha na secção 3; corrija, se possível

H2

NORMAL - Erro de funcionamento múltiplo

Ocorreu mais de um erro

- Consulte a secção 3 se for visualizado um código diferente depois de verificação e correcção

H3

NORMAL - Erro de funcionamento múltiplo

Ocorreu mais de um erro

- Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência

H4

FALHA - Falha do dispositivo de segurança

Ocorreu mais de um erro, resultando numa falha do dispositivo de segurança

- Contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência

CÓDIGOS DE ERRO FATAIS

ELEVADOR NÃO FUNCIONA

5

F1

FALHA - Falha de relé








- Reinicie a cadeira elevadora (desligue a alimentação durante 30 segundos)
- Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência

CÓDIGOS DE ERRO FATAIS (continuação na página seguinte)

CÓDIGOS ECRÃ DIGITAL

5

CÓDIGOS DE ERRO FATAIS ELEVADOR NÃO FUNCIONA

	FALHA - Falha de travões	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie a cadeira elevadora (desligue a alimentação durante 30 segundos)• Direcione a cadeira elevadora para um ponto de carga e deixe-a carregar uma hora• Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência
	FALHA - Falha de motor	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie a cadeira elevadora (desligue a alimentação durante 30 segundos)• Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência
	FALHA - Sobrecarga do motor	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie a cadeira elevador de escadas (desligue a alimentação durante 30 segundos)• Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência
	FALHA - Falha de bateria	<ul style="list-style-type: none">• Direcione a cadeira elevadora DOWN (para baixo) para um ponto de carga e deixe-a carregar
	FALHA - Excesso limite final	<ul style="list-style-type: none">• Accione manualmente a cadeira elevadora para cima OU para baixo (ver accionamento manual)• Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência
	FALHA - Interruptor OSG	<ul style="list-style-type: none">• Accione manualmente o elevador UP (para cima) para reiniciar o OSG (ver accionamento manual)
	FALHA - Desbloqueio do sistema	<ul style="list-style-type: none">• Reinicie a cadeira elevadora (desligue a alimentação durante 30 segundos)• Se não tiver encontrado uma solução, contacte o seu representante Acorn autorizado para assistência