




ACORN

MONTE-ESCALIER

M E R C I

Merci d'avoir choisi ACORN. Vous pouvez être certains que votre monte-escalier vous rendra service pendant des années et qu'il vous permettra de profiter de tout l'espace que vous offre votre maison.

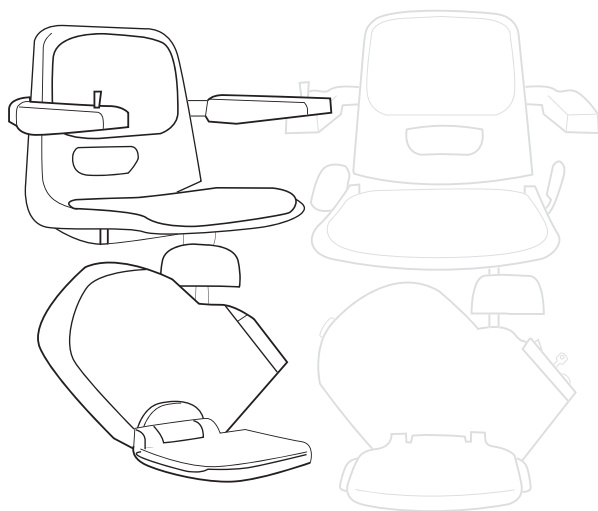

Votre monte-escalier bénéficie d'une garantie fabricant de 24 mois, qui couvre le coût de remplacement des pièces détachées défectueuses (hors pièces défectueuses dues à une mauvaise utilisation de l'appareil).

Votre monte-escalier a été conçu par des experts et fabriqué pour répondre aux meilleurs critères de qualité. Un entretien régulier est préférable pour vous assurer un maintien optimal de l'appareil.

Avant d'utiliser votre monte-escalier, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.


LE MONTE-ESCALIER

L' **ACORN Superglide** est un monte-escalier électrique conçu pour un usage domestique. S'il est utilisé correctement, il vous rendra service durant de nombreuses années.

Il est conçu pour supporter une seule personne à la fois, pesant moins de 127 kg.

L' **ACORN Superglide** fonctionne grâce à deux batteries qui se rechargent sur une prise de courant habituelle via un transformateur qui réduit la tension de 220 V à 24 V pour une sécurité d'utilisation. Cela signifie tout simplement qu'il n'y a aucun risque d'électrocution et que l'appareil sera alimenté même en cas de coupure de courant.

- ① Accoudoir relevable
- ② Affichage digital
- ③ Joystick
- ④ Manette de pivot du siège
- ⑤ Clef de contact
- ⑥ Assise relevable
- ⑦ Capteur de sécurité descente
- ⑧ Interrupteur d'isolation des batteries
- ⑨ Marche-pied avec revêtement anti-dérapant
- ⑩ Marche pied relevable
- ⑪ Capteur de sécurité montée
- ⑫ Ceinture de Sécurité
- ⑬ Capteur Infrarouge

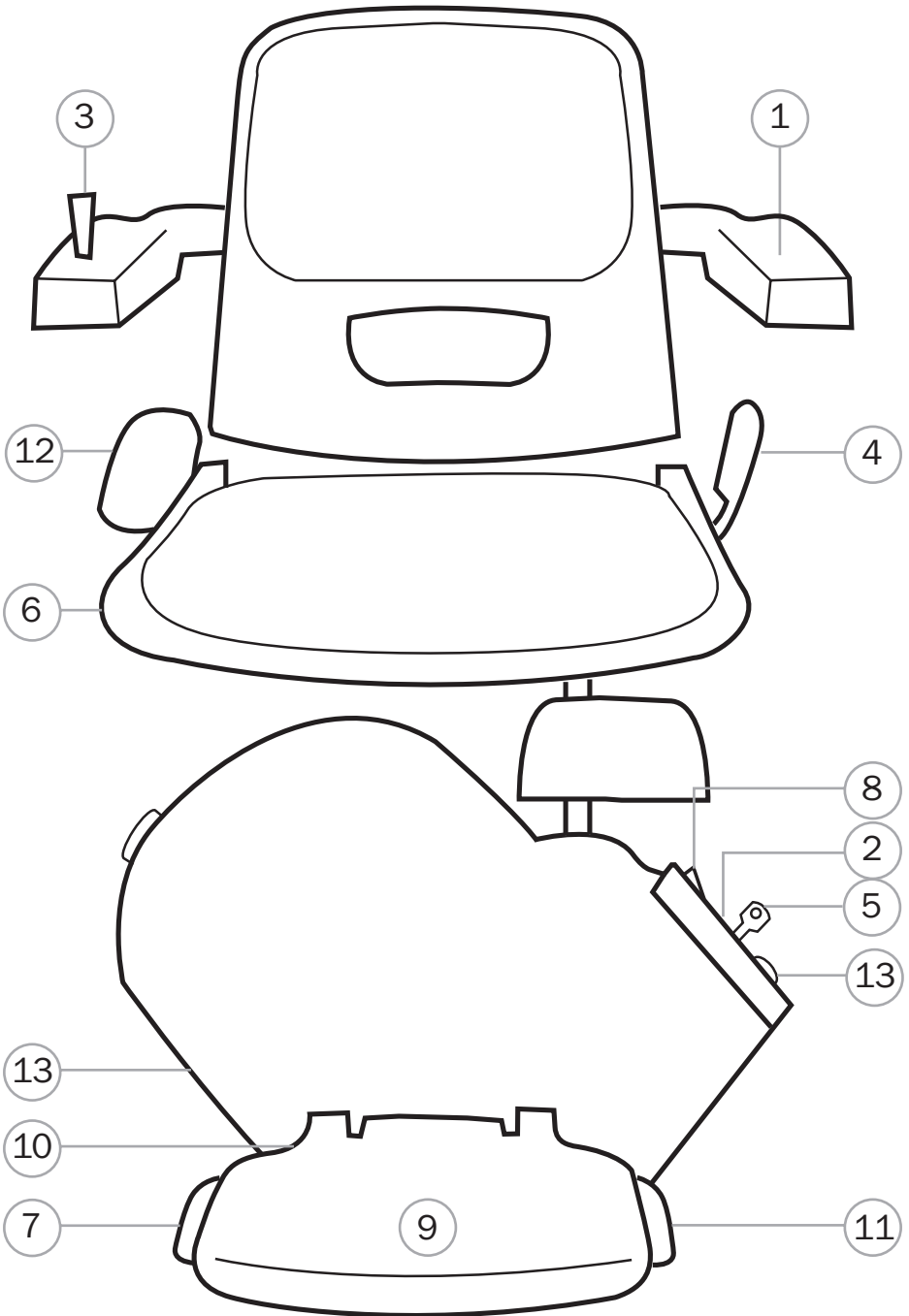

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Assurez-vous que personne ou rien ne bloque le passage de l'escalier avant d'utiliser le monte-escalier.
- Mettez-vous à l'aise et asseyez-vous bien au fond du siège avec vos bras sur les accoudoirs et vos pieds sur le repose-pieds.
- Si vous disposez d'une ceinture de sécurité, attachez-la bien.



ATTENTION! Le monte-escalier a été conçu pour ne supporter qu'une seule personne à la fois. N'essayez pas de vous installer à plusieurs dessus.




ATTENTION! Ne laissez pas les enfants jouer avec le monte-escalier. L'utilisation par un enfant doit se faire en la présence d'un adulte. Par mesure de sécurité, il est préférable d'éteindre le monte-escalier en otant la clé, en cas de présence d'enfants.



Assurez-vous que les autres membres de votre entourage ou vos visiteurs soient au courant de la présence du monte-escalier, et prévenez-les des risques potentiels.

Assurez-vous qu'aucun animal domestique ne se trouve sur le trajet, avant d'utiliser le monte-escalier.

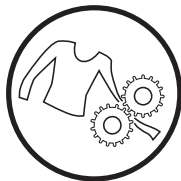


ATTENTION! Assurez-vous que vos vêtements ne puissent pas s'accrocher dans le mécanisme du monte-escalier et ainsi engendrer un accident corporel et/ou un endommagement du matériel. Veillez toujours à ce que vos vêtements ne se trouvent pas proche du rail ou du bloc moteur avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION! Il est possible que de petits objets tombent sur le rail et glissent le long de celui-ci jusqu'à se retrouver dans le mécanisme du monte-escalier. Si vous pensez qu'un objet est coincé dans l'appareil, consultez votre installateur ACORN avant toute utilisation.

ATTENTION! Pour couper l'alimentation secteur du monte-escalier, débranchez le transformateur de la prise de courant. Débranchez l'interrupteur d'isolation des batteries (8) pour éviter la décharge des batteries.


MISE EN ROUTE

CLÉ DE CONTACT

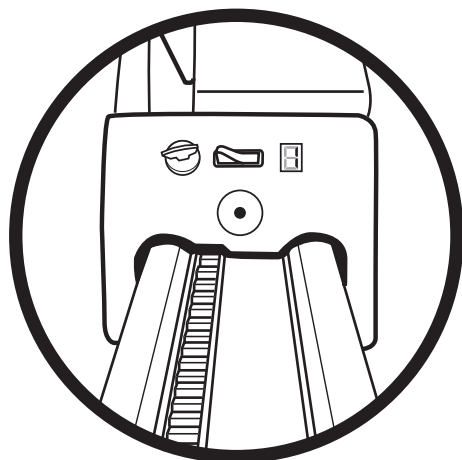



Vous trouverez la clé de contact sur le cache du bloc moteur.

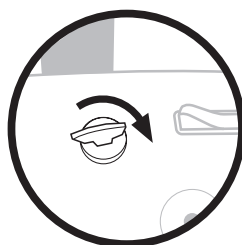Pour que l'appareil fonctionne la clé doit être tournée vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).




L'écran digital situé à côté de la clé de contact doit indiquer .

Si l'écran ne montre pas un , veuillez vous rapporter aux codes d'affichages en pages 61 et 62.

Si la clé est tournée vers la gauche ou bien retirée du barillet, l'écran affichera un  et l'appareil ne fonctionnera pas.

La clé peut aussi être retirée pour interdire l'utilisation du monte-escalier. La charge des batteries se fera toujours.

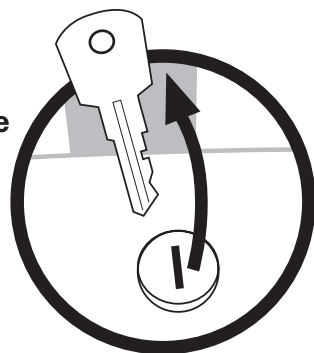


ACORN JOYSTICK

Le joystick se trouve sur l'accoudoir.

Pour actionner le monte-escalier il faut pousser le joystick dans le sens où vous désirez vous déplacer, et rester appuyé.

Vous entendrez un bip sonore signalant que l'appareil va partir.

L'appareil fonctionnera seulement si vous poussez le joystick, et s'arrêtera automatiquement lorsque vous arriverez en fin de course ou que vous relâcherez le joystick.

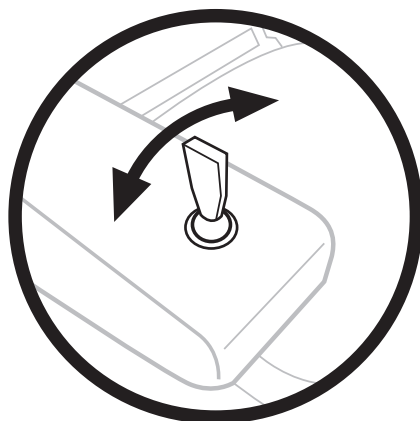

S'il n'y a pas de bip sonore lorsque vous actionnez le joystick, veuillez vérifier l'affichage digital et vous référer aux pages 61 et 62 pour la signification du code.


TELECOMMANDES



L'appareil peut aussi être actionné grâce aux deux télécommandes.

Il y a deux boutons sur chaque télécommande.


Pour que le monte-escalier monte il faut rester appuyé sur le bouton rouge. Pour faire descendre l'appareil il faut rester appuyé sur le bouton vert. Le monte-escalier s'arrêtera automatiquement en arrivant en fin de course ou bien en relâchant le bouton.

Le monte-escalier fonctionnera avec les accoudoirs, le siège et le marche-pieds repliés. Cependant, il ne fonctionnera pas si le siège est tourné (ou si le bras de sécurité du modèle Perche est relevé). Le n°  s'affichera sur l'écran digital.

Des interférences occasionnelles venant de sources extérieures peuvent dans certains cas perturber le fonctionnement de l'appareil et l'arrêter. Cette caractéristique a été mise en place pour prévenir toute utilisation non désirable. Il faudra alors relâcher le bouton de la télécommande et appuyer de nouveau.

Il est préférable de changer la pile des télécommandes tous les 6 mois.


SIEGE PIVOTANT

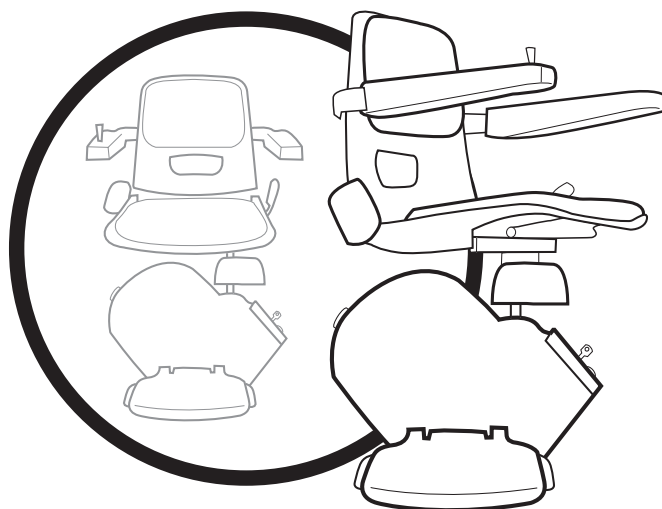


Lorsque l'appareil atteint le palier supérieur ou inférieur des escaliers, il s'arrêtera automatiquement.

Le siège peut alors être tourné pour s'asseoir sur le monte-escalier ou se relever plus facilement.

Pour tourner le siège abaissez et maintenez en position basse la manette située sur le côté de celui-ci. Cela permettra de tourner le siège face au palier. Le siège dispose de deux crans de blocage : à 45° et à 90° par rapport à sa position en mode montée ou descente.

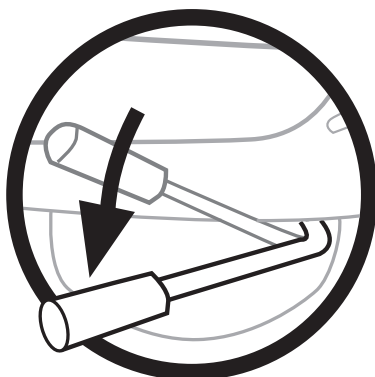


Tant que le siège est tourné l'écran digital affichera le n°  et le monte-escalier ne fonctionnera pas.

Veillez noter que le repose-pied ne pivote pas et qu'il ne faut tourner le siège qu'en haut des escaliers.

Assurez-vous que le siège est bien bloqué avant de vous installer dessus ou de vous relever.

CEINTURE DE SECURITE

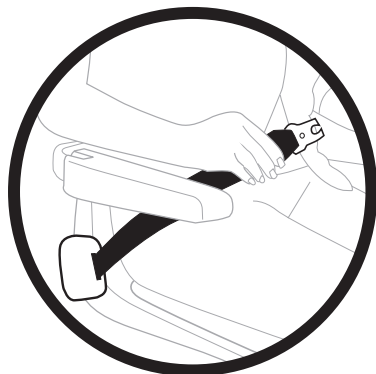


Pour attacher la ceinture de sécurité, tirez la ceinture et insérez la dans la boucle. Vous entendrez un clic lorsqu'elle sera bien mise en place.

Pour détacher la ceinture, maintenez-la d'une main et appuyez sur le bouton de la boucle de l'autre main. La ceinture se détachera automatiquement et se rétractera.



Il est important de bien maintenir la ceinture d'une main, car sans cela, elle risque de se rétracter trop rapidement au risque de vous blesser.

SIEGE ET REPOSE-PIED REPLIABLE

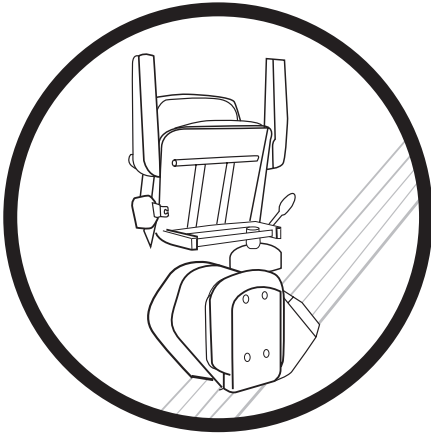

Le siège, les accoudoirs et le repose-pied peuvent être repliés lorsque vous n'utilisez pas le monte-escalier pour laisser plus d'espace dans la cage d'escalier.

L'appareil peut être activé avec les télécommandes.

POSITION DE STATIONNEMENT / RECHARGEMENT


Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est indispensable que l'appareil soit arrêté au bon endroit sur le rail.

Cela va dépendre du type de rail qui est installé.

Le transformateur doit être laissé branché en permanence.

Sur un rail standard, les deux stationnements corrects sont tout en haut et tout en bas du rail, aux endroits où l'appareil s'arrête automatiquement. C'est à ces endroits exacts que les batteries se rechargeront.


L'appareil fera un seul bip sonore qui indique que vous avez atteint le point de charge.

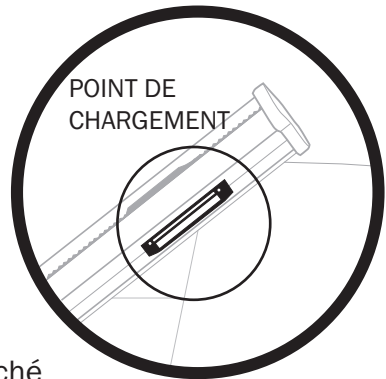


DEBRANCHER L'ALIMENTATION

Si l'appareil n'est pas utilisé durant une certaine période (vacances, maison secondaire, etc...), il est alors préférable de débrancher le transformateur de l'appareil de la prise murale.

Les étapes suivantes doivent être respectées pour éviter toutes dégradations des batteries qui ne seraient pas couvertes par la garantie.

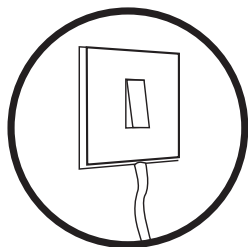

1. Débrancher le transformateur de sa prise murale (l'appareil devrait normalement émettre un BIP constant - code signifiant que l'appareil ne charge pas).

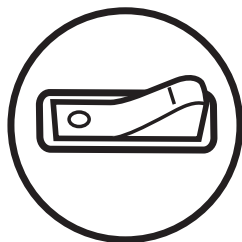

2. Déconnecter les batteries en activant interrupteur (l'interrupteur se trouve à coté de la clef et de l'écran digital du bloc moteur).

En débranchant la prise d'isolation rouge, vous déconnectez ainsi les batteries de l'appareil, leur évitant de se décharger.

LE MONTE-ESCALIER NE FONCTIONNERA PAS

Contactez votre revendeur ACORN pour de plus amples informations:



LES SECURITES

Votre monte-escaliers est pourvu d'un ensemble de sécurités de série.

Cela inclu:

Les sécurités hautes et basses du bloc moteur

Stoppent l'appareil en cas de contact avec un élément encombrant sur le rail.

Les sécurités hautes et basses du repose-pied

Stoppent l'appareil en cas de contact avec un élément bloquant le passage dans l'escalier.

La sécurité d'assise

Empêche tous mouvements du monte-escalier lorsque le siège est pivoté.

Les sécurités de fin de course

Empêchent l'appareil de sortir de son rail.

Régulateur de vitesse et frein parachute


Préviennent toutes descentes incontrôlées.

Alerte en cas de non charge des batteries

Un son est émis lorsque l'appareil ne charge pas.




Si une ou plusieurs sécurités sont activées, un code spécifique sera alors indiqué sur l'écran de contrôle de l'appareil. Ces codes peuvent être trouvés dans la section CODES en complément de l'action à entreprendre pour résoudre le problème.


REGULATEUR DE VITESSE

Notre monte-escalier est équipé d'un système de sécurité qui bloque l'appareil sur le rail en cas d'une défaillance technique ou d'une vitesse excessive. Si le régulateur de vitesse est activé, du fait d'un choc ou d'une vibration excessive, il indiquera un code  sur l'écran de contrôle de l'appareil. Il est alors possible d'utiliser la manivelle pour remonter et réinitialiser le frein moteur.
















UTILISATION DE LA MANIVELLE

Pour réinitialiser le frein moteur du monte-escalier, la procédure suivante doit être observée. **ATTENTION! Avant d'utiliser la manivelle, vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le rail ou dans l'escalier.**

1. Déconnectez les batteries en activant l'interrupteur.
2. Otez la protection en plastique blanche et insérez la manivelle sur l'axe du moteur.
3. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que l'appareil monte sur le rail d'environ 3 à 4cm.
4. Enlevez la manivelle et reconnectez les batteries en activant l'interrupteur.
5. Vérifiez que l'écran de contrôle affiche maintenant le numéro  au lieu du numéro . Si le numéro  s'affiche toujours, il sera nécessaire de répéter les étapes 1 à 4.
6. Activez le monte-escalier pour le faire monter jusqu'en haut du rail (jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement), et faites le ensuite redescendre pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Remplacez la protection en plastique blanche.














AVERTISSEMENT ! Ne jamais actionner le monte-escalier lorsque la manivelle est engagée sur le moteur, vous pourriez endommager l'appareil ou pire, vous blesser. Ne jamais tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque l'écran de contrôle montre le code  (code défaut du frein moteur). En cas de doute, contacter votre représentant ACORN pour tous conseils techniques.

CODES DEFAUTS DE L'ECRAN DE CONTROLE

ECRAN	PROBLEMES	SOLUTIONS
	PAS D'ALIMENTATION (PAS D'AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN)	 Vérifiez que le contact ON /OFF est en position ON
	NORMAL	 Si l'appareil ne fonctionne pas avec le joystick, essayez les télécommandes. Regardez si un micro interrupteur de fin de course n'est pas coincé.
	PAS DE CHARGEMENT	 Le transformateur est débranché, le courant n'arrive pas à l'appareil, ou l'appareil n'est pas sur son point de charge. Vous serez également alerté par un bip sonore.
	FREIN DE SECOURS	 Faites remonter l'appareil à l'aide de la manivelle pour réinitialiser le frein moteur (voir indication pour la manipulation de la manivelle)
	LE SIÈGE EST TOURNÉ	 Remplacez le siège dans sa position de voyage. Si équipé, vérifiez que la barre de sécurité est abaissée
	LA CLÉ EST RETIRÉE OU LE CONTACT N'EST PAS FAIT	 Vérifiez que la clef est insérée et tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.
	L'APPAREIL A DÉPASSÉ SA FIN DE COURSE	L'appareil est sortie de sa fin de course. Utilisez la manivelle et faites descendre ou remonter l'appareil.
	SÉCURITÉ BASSE DU REPOSE PIED	 Sécurité basse du repose pied est enclenchée. Vérifiez le capteur du bord descendant du repose-pied et le capteur de la coque inférieure du repose-pied.


ACORN Manuel d'Utilisation

CODES DEFAUTS DE L'ECRAN DE CONTROLE

ECRAN	PROBLEMES	SOLUTIONS
	SÉCURITÉ HAUTE DU REPOSE-PIED	 Sécurité haute du repose-pied enclenchée. Vérifiez le capteur du bord montant du repose-pied.
	SÉCURITÉ HAUTE DU CAPOT MOTEUR	Sécurité haute du capot moteur enclenchée. Vérifiez qu'aucun élément ne bloque le passage de l'appareil à la montée.
	SÉCURITÉ BASSE DU CAPOT MOTEUR	Sécurité basse du capot moteur enclenchée. Vérifiez qu'aucun élément ne bloque le passage de l'appareil à la descente.
	BATTERIES	 Batteries faibles. Laissez l'appareil sur son point de chargement pendant au moins 1 heure.
	FREIN MOTEUR	 Problème frein moteur. Essayez de réinitialiser l'appareil. Il est possible que l'appareil ne soit pas assez chargé. Laissez l'appareil sur son point de chargement.
	MOTEUR	 Essayez de réinitialiser l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, faites appel à votre revendeur. Pour réinitialiser, éteignez l'appareil pendant environ 30s (voir page 64).
	BATTERIES	 Batteries très faibles (17 Volts ou moins). Rechargez les batteries.
	RELAIS ÉLECTRIQUE	Essayez de réinitialiser l'appareil, si cela ne résout pas le problème et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, faites appel à votre revendeur.

ENTRETIEN

TÉLÉCOMMANDES




Comme il a été précédemment décrit, il peut arriver, lors de certaines occasions, que les télécommandes se déprogramment du fait d'interférences extérieures. Si cela arrivait, il est possible de réinitialiser les télécommandes. Pour ce faire, vous devez suivre la procédure suivante. Envoyez votre appareil jusqu'en bas du rail. Ensuite, tournez l'assise de sorte que l'écran d'affichage montre le chiffre .

Poussez le joystick de l'accoudoir vers le bas, comme si vous vouliez faire descendre l'appareil (même si celui-ci est déjà en bas du rail et ne peut aller plus loin), en même temps, appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pendant environ 5 secondes. Repositionnez le siège dans sa position normale, votre télécommande sera maintenant reconfigurée.

RAILS

Il est recommandé de nettoyer le rail une fois par semaine. Il est préférable d'utiliser un chiffon doux et sec ainsi qu'un nettoyant domestique. **En aucun cas vous ne devez utiliser une éponge humide ou abrasive.** Ne pas nettoyer le rail entrainera une accumulation de poussières au niveau des roulements internes du monte-escalier, ce qui laissera, en roulant, des marques noires sur le rail, similaires à des éraflures.

LES BORDS SENSIBLES


Si le monte-escalier devenait inopérant (affichant ,  ou ) il faudrait alors vérifier que l'une des sécurités des bords sensibles ne soient pas bloquées. Ceci peut être résolu en activant manuellement les bords sensibles de façon à débloquer la sécurité. Si cela ne rectifiait pas le problème, contactez votre revendeur ACORN.

LES TÉLÉCOMMANDES

Les télécommandes infra-rouges fonctionnent en utilisant une source de lumière invisible. Ce type de lumière peut-être naturellement émis par certains types d'ampoules basse tension. S'il s'avérait qu'une telle ampoule basse tension est la cause d'interférence avec les télécommandes, il faudrait alors envisager de la remplacer par une ampoule plus commune.


ACORN REINITIALISATION

Il est parfois nécessaire de réinitialiser la carte électronique du monte-escalier.

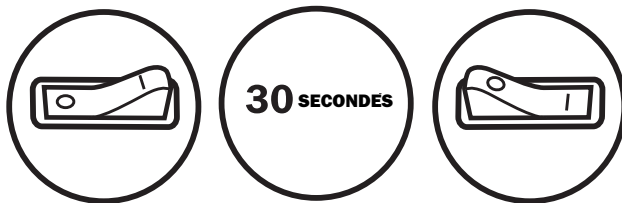

Eteignez totalement l'appareil (débranchez aussi le transformateur) pendant 30 secondes. Cela réinitialisera le code de défaut sur l'écran digital.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

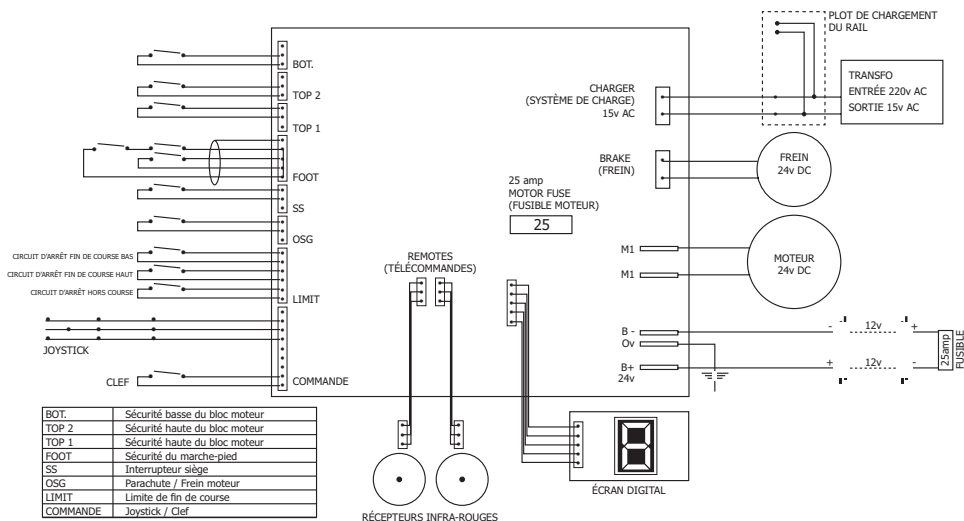

Telecom House
Millennium Business Park
Station Road
Steeton
West Yorkshire
BD20 6RB
UNITED KINGDOM

info@acornstairlifts.com
www.acornstairlifts.com

ACORN Mobility Services Ltd se réserve à tout moment le droit de modifier toutes ou partie des informations mentionnées dans ce manuel.

Les reproductions contenues dans ce manuel d'utilisation peuvent être sensiblement différentes du produit actuel.

