


# ACORN STOELLIFTEN

## Dank U

**Dank u wel voor het kiezen voor Acorn.** U kan er zeker van zijn dat uw stoellift u vele jaren van betrouwbare service zal geven en hierdoor kunt u ten volle genieten van uw gehele huis.

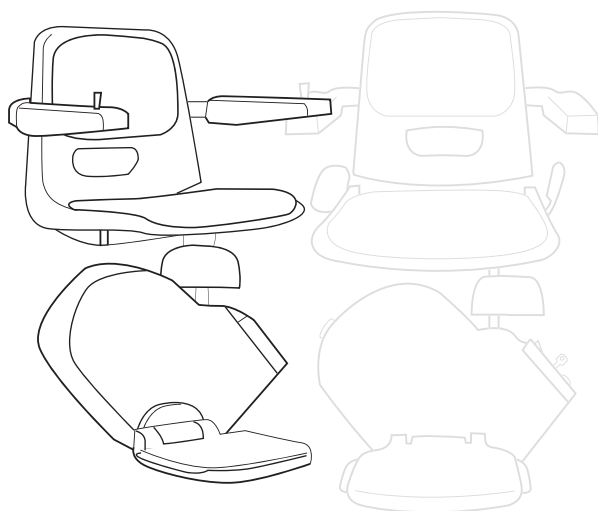

Uw stoellift is verzekerd met een fabrikantegarantie van 24 maanden, die de reserveonderdelen dekt (echter, problemen die veroorzaakt zijn door wangebruik van het apparaat zijn niet gedekt door de garantie).

Uw stoellift is ontworpen door experts en gefabriceerd tot de hoogste standaard. Regelmatig onderhoud is vereist om veilige en probleemloze service te garanderen.

**Lees deze instructies eerst zorgvuldig door,  
voordat u de stoellift gebruikt.**


# DE STOELLIFT

De **ACORN Superglide** is een op elektriciteit werkende stoellift ontworpen voor huiselijk gebruik. Indien het op de juiste manier gebruikt wordt, zal het voor vele jaren veilige en betrouwbare service zorgen.

Het is ontworpen om één persoon te dragen, die niet meer dan 127 kg weegt.

De **ACORN Superglide** wordt aangedreven door een intern batterijblok, die wordt opgeladen via de huiselijke netspanning, door middel van een transformator die de netspanning vermindert tot een veilig niveau. Dit betekent dat er geen risico is op een elektrische schok en ook dat de stoellift blijft functioneren, zelfs als er een stroomuitval is.

- ① Opklapbare armleuning
- ② Status beeldscherm
- ③ Joystick bediening (flip-flop schakelaar)
- ④ Hefboom voor het draaien van de stoel
- ⑤ Sleutelschakelaar
- ⑥ Opklapbare zitting
- ⑦ Veiligheidssensor
- ⑧ Isolatieschakelaar voor de batterijen
- ⑨ Anti-slip oppervlak van de voetensteun
- ⑩ Opklapbare voetensteun
- ⑪ Veiligheidssensor omhoog
- ⑫ Veiligheidsgordel (optioneel)
- ⑬ Infra rood sensoren

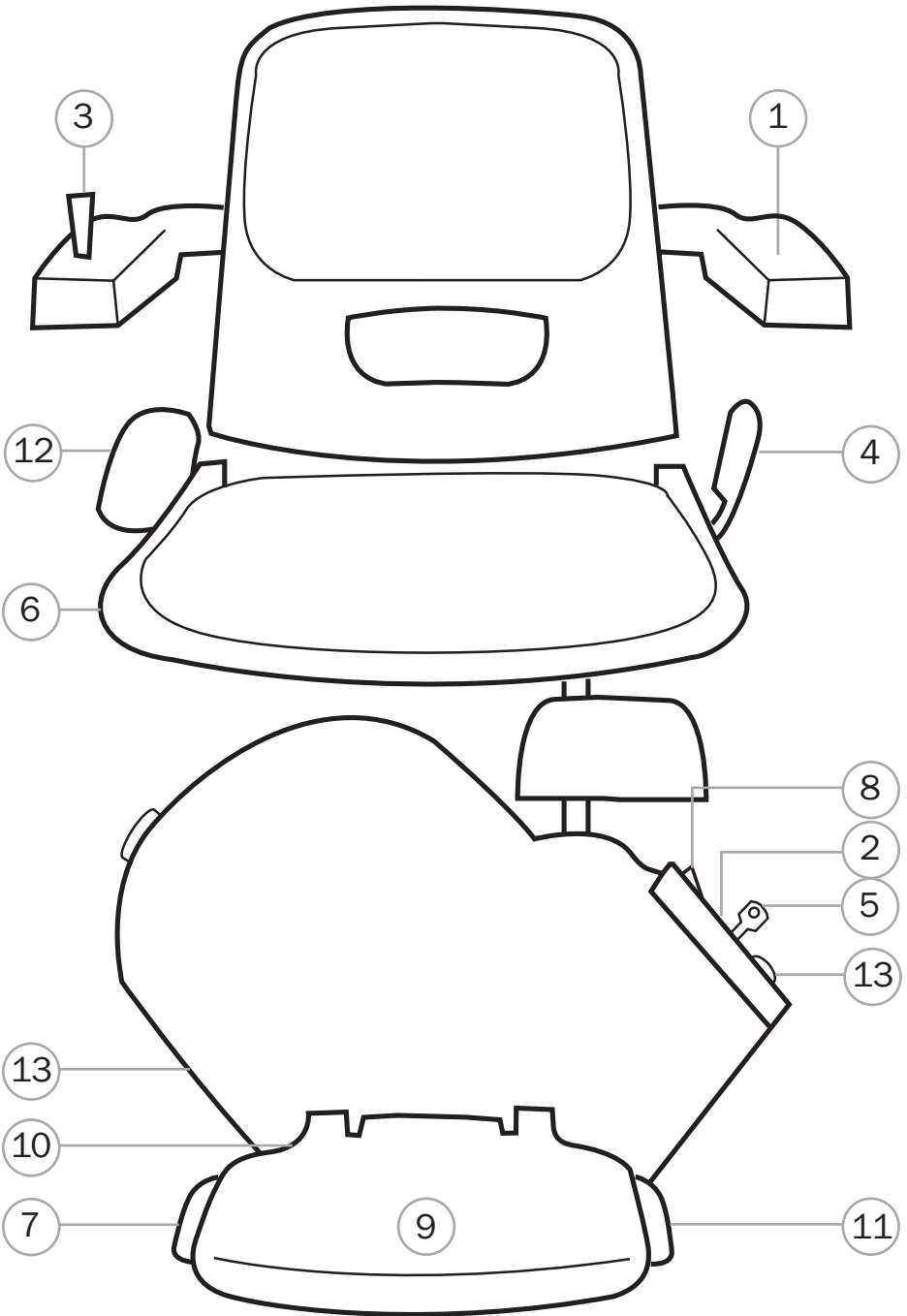

# ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Wees ervan verzekerd dat de trap niet gebruikt wordt door anderen en vrij is van objecten of obstakels voordat u de stoellift gebruikt.
- Ontspan en zit goed achterover in de stoel met de armen op de armleuningen en uw voeten recht op de voetensteun.
- Als er een veiligheidsgordel aanwezig is, maak deze dan goed vast.




**WAARSCHUWING!** De stoellift is ontworpen om één persoon tegelijk te dragen. Probeer nooit meer dan één persoon te dragen.

**WAARSCHUWING!** Laat kinderen niet met de stoellift spelen. Gebruik door kinderen moet altijd onder toezicht gebeuren. Voor de veiligheid adviseren wij de stoellift uit te schakelen en de sleutel te verwijderen, als er een risico is dat ze eraan gaan zitten.




**Maak andere huisbewoners of bezoekers erop attent dat de stoellift in gebruik is, zodat er voor hun geen struikelgevaar is.**

**Controleer of huisdieren uit de weg zijn, voordat u de stoellift gebruikt.**

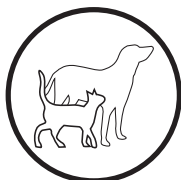

**WAARSCHUWING!** Controleer of er geen risico is dat delen van uw kleding vast kunnen gaan zitten in het mechanisme van de stoellift, omdat dit kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan het toestel. Controleer altijd of uw kleding niet in de weg zit van de rail of het ondersteel assemblage, voordat u de stoellift gebruikt.

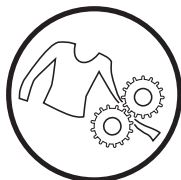


**OPGELET!** Het is mogelijk dat er een klein object op de stoellift rail valt, die naar beneden kan glijden en in het stoellift mechanisme vast komt te zitten. Als u vermoedt dat er een vreemd object vast is komen te zitten in het toestel, raadpleeg dan eerst uw ACORN vertegenwoordiger, voordat u het weer gebruikt.

**WAARSCHUWING!** Om de netspanning aanvoer naar de stoellift te verbreken, haal dan de stekker uit het stopcontact. Schakel ook de isolatieschakelaar voor de batterijen (8) uit, dit voorkomt batterijverbruik.


# WERKING


## SLEUTELSCHAKELAAR

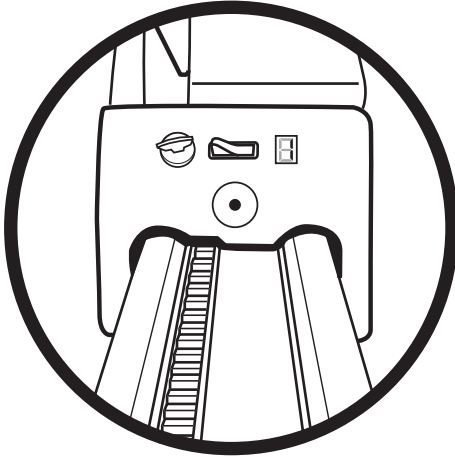



U vindt de sleutelschakelaar op de beschermkap van het onderstel.

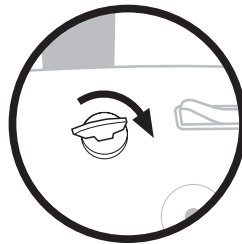Om het toestel in werking te stellen, moet de sleutel erin zitten en rechtsoom gedraaid worden (met de klok mee).




Het beeldschermpaneel, gesitueerd naast de sleutel, zal  aangeven.

Als het beeldscherm niet de  aangeeft, controleer dan de DIGITALE BEELDSCHERMCODES op pagina 93 en 94.

Wanneer de sleutel linksom is gedraaid of eruit is gehaald zal het beeldscherm  aangeven en werkt het toestel niet.

**De sleutel kan er ook uitgehaald worden om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.** Dit zal het opladen niet beïnvloeden.

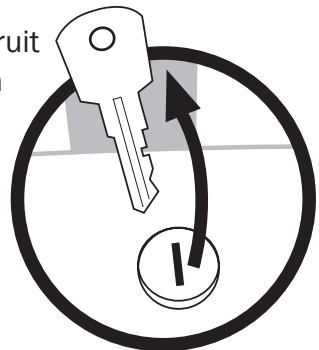


## ACORN Gebruikershandleiding

# FLIP-FLOP SCHAKELAAR

De flip-flop schakelaar bevindt zich op de armsteun.

Om het toestel in beweging te stellen moet u de schakelaar in de gewenste richting gedrukt houden.

Er zal een hoorbare pieptoon worden gegeven als teken dat het commando is ontvangen.

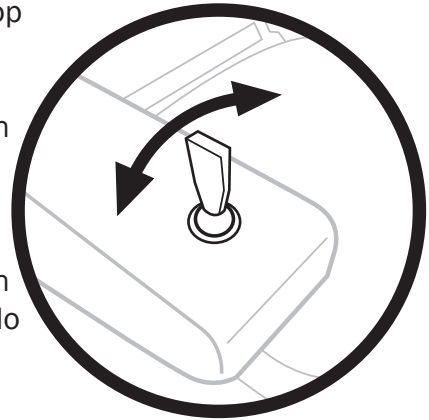

Het toestel komt alleen in beweging wanneer de flip-flop schakelaar ingedrukt wordt gehouden en het stopt automatisch wanneer het toestel het eind bereikt van de rail of wanneer de flip-flop schakelaar wordt losgelaten.


**Als de pieptoon niet wordt gehoord wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, controleer dan de beeldschermcode en raadpleeg de beeldschermcode sectie.**

## AFSTANDSBEDIENINGEN



Het toestel kan ook in beweging worden gesteld met de afstandsbediening. Er zijn twee knoppen op de afstandsbediening.


Houd de rode knop ingedrukt om het toestel omhoog te zenden. Houd de groene knop ingedrukt om het toestel omlaag te zenden. Het toestel zal automatisch stoppen aan het eind van de rail of wanneer de knop wordt losgelaten.

Het toestel kan ook in beweging worden gebracht met de armsteunen, zitting of voetensteun in de opgeklapte positie. Echter, dit is niet mogelijk wanneer de stoel gedraaid is, of wanneer de veiligheidssteun nog omhoog staat (alleen van toepassing bij het perch model en sit-and-stand model). Dit zal worden aangegeven met een  op het beeldschermpaneel.

Toevallige storing door bronnen van buitenaf kan in sommige gevallen de lift tot een stoppen brengen. Dit is een normaal verschijnsel om toevallige bewegingen te voorkomen. Het kan worden verholpen door de knop van de afstandsbediening los te laten en daarna weer in te drukken.

**Het is aanbevolen de batterijen in de afstandsbediening om de 6 maanden te verwisselen**

## DRAAISTOEL

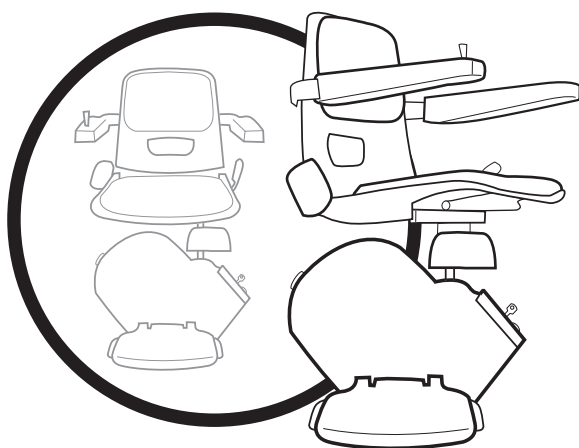



Wanneer het toestel het bovenste of onderste deel van de rail bereikt zal het automatisch stoppen.

De stoel kan nu gedraaid worden om het erop en eraf gaan van de stoellift te vergemakkelijken.

Om de stoel te draaien moet de hefboom aan de zijkant van de zitting ingedrukt naar beneden worden gehouden.

Dit maakt het mogelijk de stoel te draaien richting de overloop. De stoel zal vergrendelen bij 45° en 90° van de reispositie.

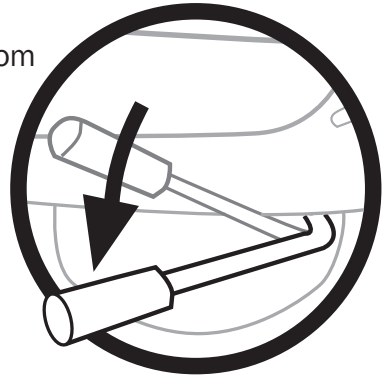


Wanneer de hefboom echter is losgelaten zal het toestel niet in beweging kunnen worden gesteld zolang de stoel gedraaid is, aangegeven door  op het beeldschermpaneel.

**Let op; de voetensteun kan niet draaien en de stoel draait alleen aan het bovineinde van de trap.**

Controleer of de stoel in de goede positie is gesteld voordat u erop of eraf gaat.

## VEILIGHEIDSGORDEL

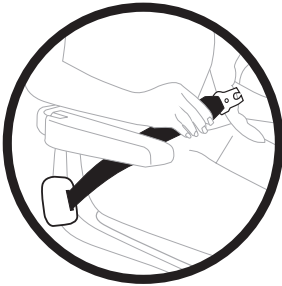


Om de veiligheidsgordel vast te maken, trek de gordel eruit en steek de gesp in de beugel. Een positieve klik zou hoorbaar moeten zijn, wat betekent dat de gordel op de juiste manier gesloten is.

Om de veiligheidsgordel los te maken, houd de gordel met één hand vast en druk op de kleine knop op de beugel. De gesp zal automatisch loslaten en hierdoor kan de gordel losgemaakt worden.



**Het is belangrijk dat de gordel wordt vastgehouden terwijl het wordt losgemaakt, anders gaat het te snel los en dit kan resulteren in wegschieten en kan letsel veroorzaken.**

# HET OPKLAPPEN VAN DE STOEL/VOETSTEUN

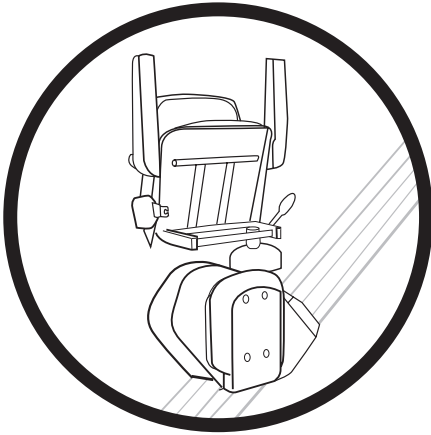

De zitting, de armsteunen en de voetensteun kunnen opgeklapt worden wanneer ze niet in gebruik zijn. Hierdoor is er meer ruimte op de trap en wordt de ruimte in de gang efficiënter gebruikt.

De lift kan in werking worden gesteld met behulp van de afstandsbedieningen.

## PARKEREN / OPLADEN


Wanneer de stoellift niet in gebruik is, is het belangrijk dat het toestel op de rail wordt achtergelaten in de juiste positie.

Dit is afhankelijk van het soort rail.

De netspanning zou permanent aangesloten moeten zijn.

De juiste posties op een standaard rail zijn aan de boven- en onderkant van de rail, waar het toestel automatisch stopt. Op deze posities ontvangt het toestel stroomvoeding van de netspanning, hierdoor kan het toestel de interne batterijen opladen.


De lift zal één pieptoon geven als indicatie dat een oplaadpunt is bereikt.

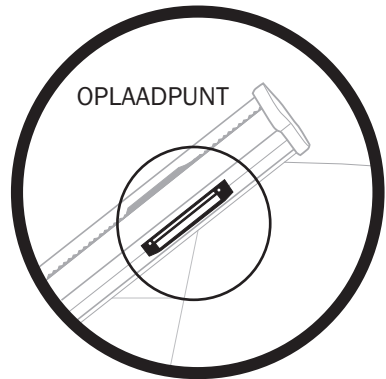


# DE STROOM UITSCHAKELEN

Als het toestel voor een lange tijd niet gebruikt wordt (vakanties etc.), kan u ervoor kiezen het toestel van de netspanning los te koppelen.

De volgende procedure moet opgevolgd worden om batterijstoring te voorkomen, dat overigens niet gedekt wordt door de fabrikanten garantie.

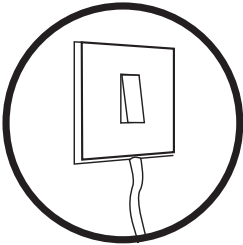

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact.**  
(Het toestel zal nu een constant piepgeluid geven, als waarschuwing dat er niet meer opgeladen kan worden)

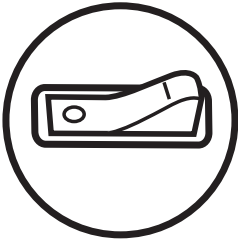

- 2. Schakel de isolatieschakelaar voor de batterijen uit.** (Bevindt zich op het onderstel naast de sleutel en het beeldscherm).

Door de batterij isolatie uit te schakelen, worden de interne batterijen uitgeschakeld en dit voorkomt batterij verbruik.

## LIFT KOMT NIET IN BEWEGING

Neem contact op met uw ACORN dealer voor verdere assistentie:



# VEILIGHEIDSFUNCTIES

De stoellift heeft standaard een hele rij veiligheidsfuncties.

Hieronder vallen:

**Veiligheidspanelen op het onderstel, boven en onder.**

Stopt het toestel zodra het in contact komt met een obstakel op de rail.

**Veiligheidsranden op de voetensteun, boven en onder.**

Stopt het toestel zodra het in contact komt met een obstakel op de trap.

**Draai stoel schakelaar.**

Voorkomt plotselinge bewegingen van de stoellift met de stoel in gedraaide positie.

**Eindpunt schakelaar.**

Voorkomt dat de stoellift te ver doorgaat.

**Snelheidsregulator en veiligheids tandwiel.**

Voorkomt ongecontroleerde afdaling.

**Waarschuwing dat er niet meer opgeladen kan worden.**

Hoorbaar waarschuwingsgeluid.

Als één of meer van de veiligheidshulpmiddelen geactiveerd zijn zal de juiste code worden aangegeven op het beeldschermpaneel. Deze codes kunnen gevonden worden in de code sectie samen met de juiste actie die dan ondernomen moet worden.

# SNELHEIDSREGULATOR

De lift is uitgerust met een veiligheidshulpmiddel (s.r.) dat de lift zal vastzetten op de rail in geval van een mechanische fout of overmatige snelheid. Als de s.r. niet goed werkt, veroorzaakt door een buitensporige schok of vibratie, aangegeven door  op het beeldschermpaneel, dan is het mogelijk de lift met de hand op te winden om de stoellift opnieuw op te starten.

## OPWINDEN MET DE HAND

Om de lift met de hand op te winden moeten de volgende maatregelen in acht worden genomen. **WAARSCHUWING! Wanneer u de lift met de hand opwind moet er altijd goed worden gekeken of er mogelijke obstakels zijn.**














1. Schakel de isolatieschakelaar voor de batterijen uit.
2. Verwijder het witte klepje op het onderstel (waar een sticker bij staat met “hand winden”) en steek het handwindwiel op de motoras.
3. Draai het wiel met de klok mee, zodat de lift zo’n 2,54 cm omhoog beweegt.
4. Verwijder het wiel en schakel de isolatieschakelaar voor de batterijen in.
5. Controleer of het beeldscherm paneel verandert is van een  naar een . Als het nog steeds een  aangeeft, herhaal dan de stappen 1 tot en met 4.
6. Laat de lift omhoog gaan tot het automatisch stopt en dan naar beneden om te controleren of alle functies het nog doen. Zet het klepje terug.

**WAARSCHUWING!** Laat de lift nooit in werking met het handwiel er nog in, dit kan leiden tot ernstig letsel of schade. Draai het wiel nooit tegen de klok in, dit kan leiden tot beschadiging van de snelheidsregulator (in geval van twijfel neem contact op met uw ACORN vertegenwoordiger voor technisch advies).

# DIGITALE BEELDSCHERMCODES

Beeldscherm	Defect	Mogelijke oplossing
	APPARAAT IS UITGESCHAKELD	 <p>Controleer of de schakelaar van AAN/UIT op AAN staat</p>
	NORMAAL	 <p>Als de flip-flop schakelaar niet werkt, probeer het dan met de afstandsbediening. Een limiet schakelaar is mogelijk blijven haken.</p>
	GEEN STROOM	 <p>De stekker is niet aangesloten op de netspanning of de lift is niet bij het oplaadpunt. Er zal ook een piepgeluid hoorbaar zijn.</p>
	S.R (zie opwinden met de hand)	 <p>Wind de lift met de hand op om de lift opnieuw op te starten.</p>
	STOEL IS GEDRAAID	 <p>Draai de stoel terug in de normale positie. De veiligheidssteun (als die aanwezig is) is niet omlaag.</p>
	SLEUTEL ERUIT	 <p>Controleer of de sleutel erin zit en of het rechtsom gedraaid is.</p>
	EINDLIMIET	<p>De lift is te ver doorgereden. Wind de lift omhoog of omlaag.</p>
	VOETENSTEUN OMLAAG	 <p>De onderste veiligheidsrand is geactiveerd. Controleer de onderste veiligheidsrand. Controleer het veiligheidspaneel aan de onderkant van de voetensteun.</p>

# DIGITALE BEELDSCHERMCODES

Beeldscherm	Defect	Mogelijke oplossing
	VOETENSTEUN OMHOOG	 De bovenste veiligheidsrand is geactiveerd.
	ONDERSTEL OMHOOG	Het bovenste veiligheidspaneel is geactiveerd.
	ONDERSTEL OMLAAG	Het onderste veiligheidspaneel is geactiveerd.
	BATTERIJEN	 De batterijen zijn leeg. Laat de lift opladen bij het oplaadpunt voor ongeveer 1 uur.
	REMMEN	 Remfout. Probeer de lift opnieuw op te starten. Mogelijk zijn de batterijen leeg, probeer ze eerst op het oplaadpunt op te laden.
	MOTOR	 Probeer opnieuw op te starten. Als dit niet werkt heeft u een technicus nodig. Om de lift opnieuw op te starten, dient u de schakelaar voor de batterijen uit te schakelen voor 30 seconden (zie pagina 96).
	BATTERIJEN	 Batterijen zijn bijna leeg (17 volt of minder). Laad ze op.
	RELAIS DEFECT	Probeer de lift opnieuw te starten, als dit niet werkt, bel dan uw service operator voor verdere instructies.

# ZORG EN ONDERHOUD

## AFSTANDSBEDIENINGEN




Zoals al eerder vermeld, kan het voorkomen dat de afstandsbedieningen hun programmering verliezen door invloeden van buitenaf. Als dit gebeurt kunt u de afstandsbediening opnieuw instellen door de lift naar beneden te sturen. Draai dan de stoel, zodat het digitale beeldscherm een  aangeeft. Druk dan de flip-flop schakelaar naar beneden (zelfs al gaat de lift niet verder naar beneden) en druk tegelijkertijd op de rode knop van de afstandsbediening voor ongeveer 5 seconden. Wanneer de stoel weer in de normale positie is gedraaid, zal de afstandsbediening weer juist geprogrammeerd zijn.

De infra rode afstandsbedieningen werken door een onzichtbare licht straal. Dit licht kan ook worden afgegeven door andere bronnen, bijvoorbeeld gloeilampen met lage energie. Als deze bron storing veroorzaakt met de afstandsbediening, is het aanbevolen dat het wordt verwisseld met een normale.

## RAILS

Het is aanbevolen om de rails wekelijks schoon te maken. Dit moet worden gedaan met een droge doek en u kan een gewoon huishoud poetsmiddel gebruiken. **Onder GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN moet u een NATTE OF RUWE DOEK gebruiken.** Wanneer de rail niet wekelijks wordt schoongemaakt, zal stof zich ophopen op de interne rollers van de lift, die dan zwarte strepen achterlaten en in sommige gevallen een residu dat lijkt op metaal schaafsel. Het is ook aanbevolen de stalen tanden op de rail regelmatig te stofzuigen.

## VEILIGHEIDSPANELEN



Wanneer de lift niet werkt (een ,  of  aangeeft), kan dit veroorzaakt zijn doordat één van de veiligheidspanelen ingedrukt is. Dit kan worden verholpen door simpelweg het relevante veiligheidspaneel even in te drukken en dan weer los te laten. Als dit het probleem niet verhelpt, zult u contact moeten opnemen met uw ACORN vertegenwoordiger.

## OVERIG

Als het blijkt dat de stoellift regelmatig een piepgeluid laat horen (ongeveer één keer per minuut), controleer dan of dit niet veroorzaakt wordt door een rookmelder die een waarschuwing geeft dat de batterij bijna leeg is.


# RESETTEN

In sommige gevallen is het noodzakelijk om het bedieningspaneel van de lift opnieuw op te starten.

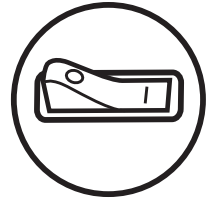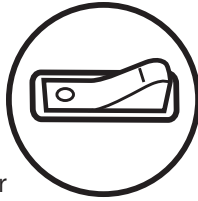

Schakel de batterijschakelaar uit voor 30 seconden, schakel het daarna weer in. Dit zal de defect codes op het beeldscherm resetten.

# BEDRADINGSSCHEMA

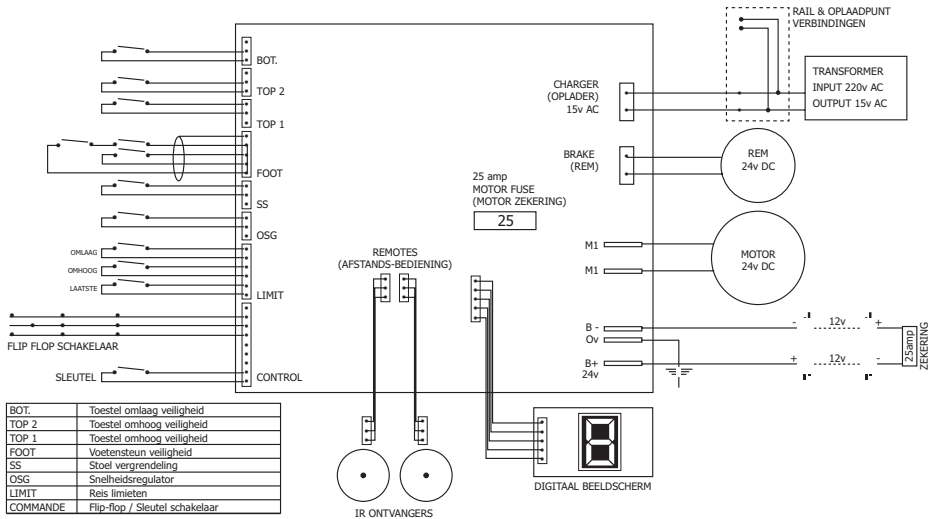

Telecom House  
Millennium Business Park  
Station Road  
Steeton  
West Yorkshire  
BD20 6RB  
UNITED KINGDOM

info@acornstairlifts.com  
www.acornstairlifts.com

Alle details in deze instructies mogen veranderd worden zonder mededeling.

De illustraties in deze instructies kunnen enigszins verschillen met het werkelijke product.

