




# ACORN

## KRZESEŁKA DŹWIGOWE

### DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wybranie Krzeselka Dźwigowego ACORN. Nasze krzeselko zapewni Ci wieloletni, niezawodny serwis i pozwoli na pełne wykorzystanie całego domu.

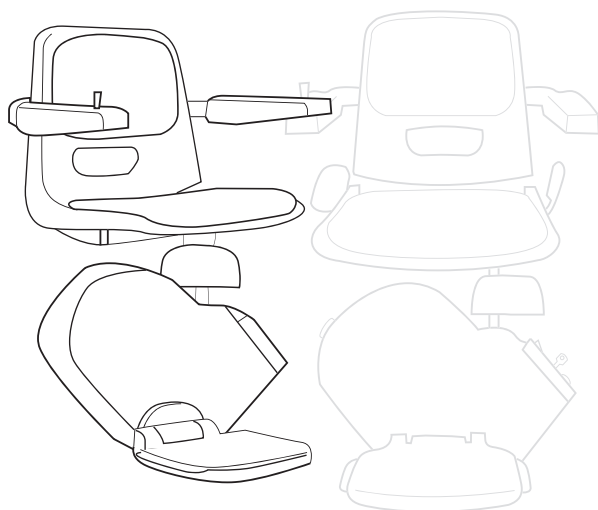

Twoje krzeselko objęte jest 24 miesięczną gwarancją, która pokrywa wymianę części, nie obejmuje jednak szkód wywołanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.

Twoje krzeselko jest zaprojektowane i wyprodukowane przez ekspertów, aby zaoferować Ci najwyższą jakość. Regularna konserwacja jest wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa i bezproblemowego użytkowania.

Przed użyciem krzeselka, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi


## KRZESEŁKO DŹWIGOWE

ACORN Superglide jest zasilanym elektrycznie krzesłem dźwigowym, przeznaczonym do użytku domowego. Używane prawidłowo, będzie służyło Ci przez wiele lat.

Przeznaczone jest ono do przewozu jednej osoby na raz, o wadze nie przekraczającej 127 kg.

ACORN Superglide zasilane jest z wewnętrznej baterii akumulującej, która podłączona jest do sieci poprzez transformator, który redukuje napięcie do bezpiecznego poziomu. Oznacza to, że nie ma ryzyka porażenia prądem, a także, że krzesło będzie nadal działać, nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.

- 1 Składane podłokietniki
- 2 Wyświetlacz cyfrowy
- 3 Joystick
- 4 Dźwignia obrotowego siedzenia
- 5 Włącznik główny (stacyjka z kluczem)
- 6 Składane siedzenie
- 7 Sensory bezpieczeństwa
- 8 Przełącznik baterii
- 9 Antypoślizgowa powierzchnia podnóżka
- 10 Składany podnóżek
- 11 Sensor bezpieczeństwa – strona górna
- 12 Pasy bezpieczeństwa
- 13 Czujniki sygnału podczerwieni

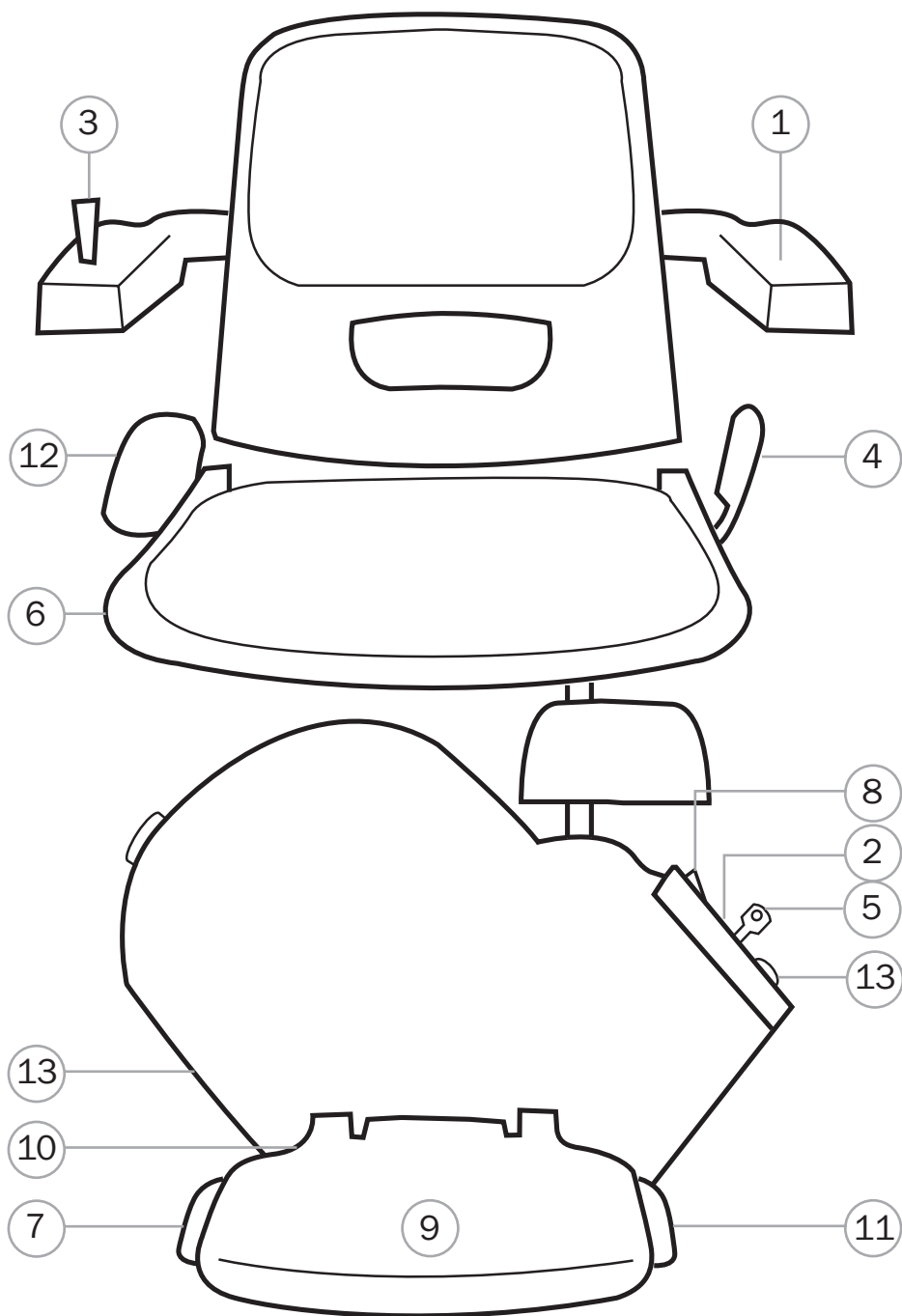

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zanim użyjesz windy, upewnij się, że nikt nie korzysta ze schodów i że cała droga jest wolna od przedmiotów, które mogą zakłócić jazdę windy.
- Rozluźnij się i usiądź na krzeselku dotykając plecami oparcia, z dłońmi na oparciach i stopami w pełni na podnóżku.
- Jeżeli krzeselko posiada pasy, zapnij je przed rozpoczęciem jazdy




**UWAGA!** Krzeselko zaprojektowane jest do przewożenia tylko jednej osoby na raz. Nigdy nie próbuj przewozić więcej niż jedną osobę.

**UWAGA!** Nie pozwól dzieciom bawić się krzeselkiem. Użytkowanie przez dzieci powinno być zawsze monitorowane. Dla bezpieczeństwa radzimy wyłączyć windę i wyciągnąć kluczyk.




Upewnij się, że inni domownicy i goście wiedzą o zainstalowanym na schodach krzeselku, aby uniknąć ewentualnego ryzyka potknięcia się.

Zanim użyjesz krzeselka, upewnij się, że zwierzęta domowe są w bezpiecznej odległości.

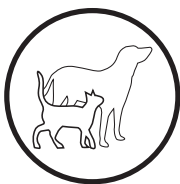

**UWAGA!** Upewnij się, że nie ma żadnej możliwości, aby ubranie mogło zakłócić działanie mechanizmu krzeselka. Zawsze sprawdzaj czy Twoje ubranie nie dotyka lub nie leży na szynie.


**UWAGA!** Może się zdarzyć, że drobne przedmioty mogą dostać się do mechanizmu krzeselka lub pozostać niezauważone na szynie. Jeśli podejrzewasz, że tak się stało, skonsultuj się ze swoim doradcą ACORN przed ponownym użyciem windy.

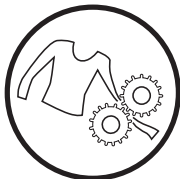

**UWAGA!** Aby odłączyć od urządzenia dopływ prądu zmiennego, wyciągnij wtyczkę z kontaktu oraz odłącz przełącznik baterii na wagoniku, aby zapobiec wyczerpaniu się baterii.


## DZIAŁANIE / OBSŁUGA

### WŁĄCZNIK GŁÓWNY (STACYJKA Z KLUCZEM)

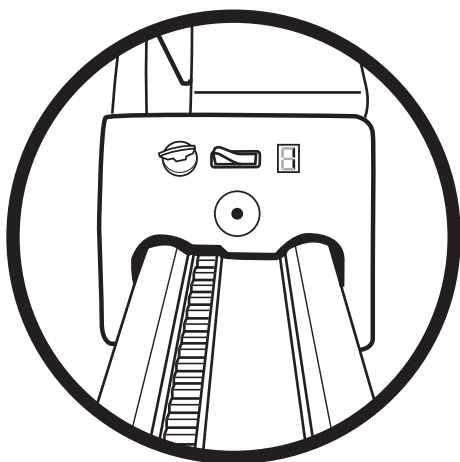

Włącznik główny znaleźć możesz na obudowie wagonika.


Aby krzeselko działało, kluczyk musi być umieszczony w stacyjce i obrócony w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

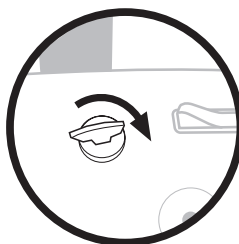

Wyświetlacz cyfrowy, znajdujący się tuż przy włączniku głównym, pokaże nr **1**. Jeśli wyświetlacz pokazuje inny numer, proszę sprawdzić rozdział Kody Cyfrowe (str. 109 – 110).

Kiedy kluczyk jest przekreślony w lewo, wyświetlacz pokaże nr **5** i krzeselko nie będzie działać.

Kluczyk można też wyciągnąć, by zapobiec użyciu przez osoby nieupoważnione. Nie ma to żadnego wpływu na ładowanie.

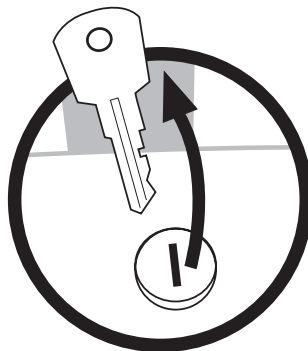


## JOYSTICK

Joystick umieszczony jest na oparciu dla rąk. Aby sterować krzesłem, należy lekko go przycisnąć i trzymać w pożądanym kierunku jazdy.

Potwierdzeniem otrzymanego sygnału będzie sygnał dźwiękowy.

Krzesło będzie działać tylko podczas trzymania joysticka i zatrzyma się automatycznie na końcu trasy, lub kiedy joystick zostanie zwolniony.

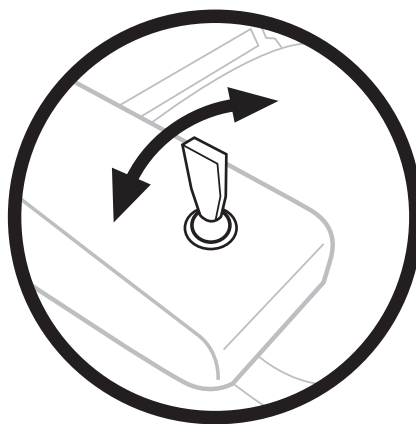

Jeżeli w momencie przyciskania joysticka nie usłysz Państwo sygnału dźwiękowego, proszę sprawdzić wyświetlacz cyfrowy i porównać numer z Kodami Cyfrowymi.

## PILOTY

Krzesłem można sterować również przy pomocy pilota, który wyposażony jest w dwa przyciski.




Aby wysłać krzesło w górę, naciśnij i przytrzymaj guzik czerwony. Aby wysłać krzesło na dół, naciśnij i przytrzymaj guzik zielony. Krzesło zatrzyma się automatycznie na końcu trasy lub kiedy przycisk zostanie zwolniony.

Krzeselko będzie działać ze złożonymi oparciami, siedzeniem i podnóżkiem, jednak nie będzie działać, jeśli siedzenie zostało skrócone (lub drążek oparcia jest podniesiony); wtedy na wyświetlaczu pojawi się nr **H**.

W przypadku zakłócenia działania pilota przez inne urządzenia, należy zwolnić przycisk i nacisnąć jeszcze raz.

Zalecana jest wymiana baterii pilota co sześć miesięcy.

## OBROTOWE SIEDZENIE

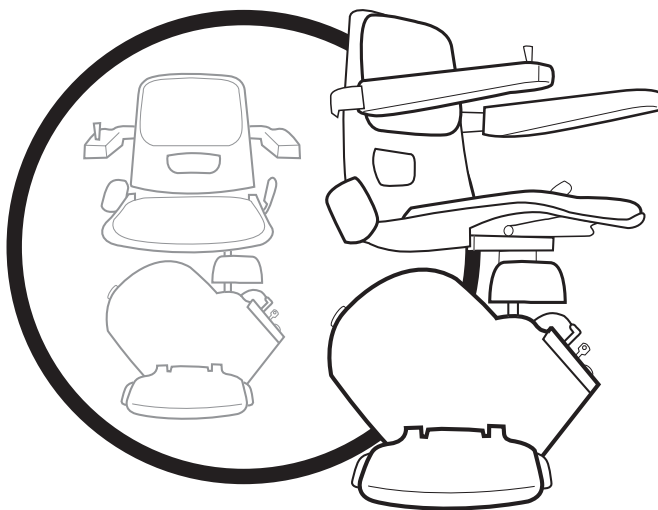


Kiedy krzeselko osiągnie górny lub dolny limit trasy, zatrzyma się ono automatycznie.

Siedzenie można teraz obrócić, aby ułatwić wsiadanie lub zsiadanie. Aby obrócić siedzenie naciśnij i przytrzymaj dźwignię znajdującą się z boku.


Krzeselko można zablokować pod kątem 45° lub 90° względem pozycji jazdy. Krzeselko nie będzie jednak działać ze skrzyconym siedzeniem, a wyświetlacz pokaże nr **F**.

Proszę zauważyć, że podnózek nie obraca się, a siedzenie obraca się tylko u góry schodów.

Przed wsiadaniem i zsiadaniem upewnij się, że siedzenie jest zablokowane w prawidłowej pozycji jazdy.

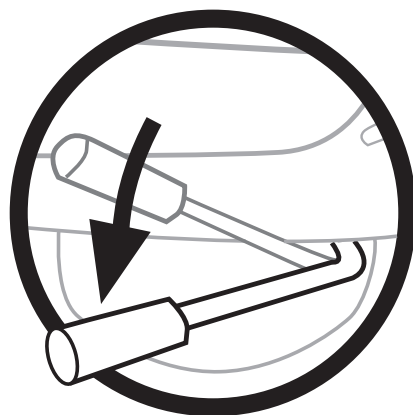

## PAS BEZPIECZEŃSTWA

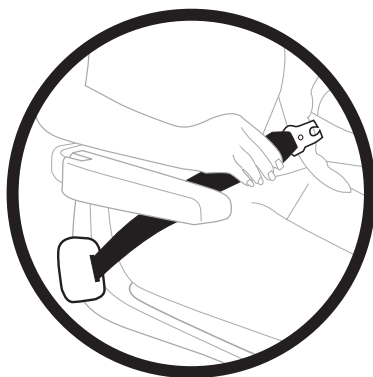


Aby zapiąć pasy, należy pociągnąć zaczep i umieścić go w zatrzasku. Jeśli usłyszysz „kliknięcie” znaczy to, że pasy są prawidłowo zapięte.

Aby odpiąć pas, przytrzymaj go jedną ręką, naciskając jednocześnie przycisk w klamrze. Zaczep zwolni się automatycznie, powodując zwinięcie pasa.



**WAŻNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ PAS W MOMENCIE ZWIJANIA, INACZEJ MOŻE ON ZWINĄĆ SIĘ ZBYT SZYBKO I UDERZYĆ UŻYTKOWNIKA.**

## SKŁADANE SIEDZENIE, OPARCIA DLA RĄK I PODNÓŻEK

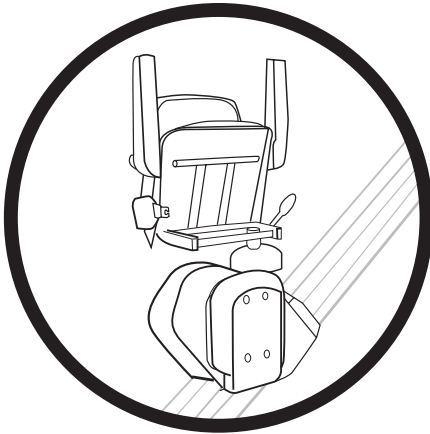

Siedzenie i oparcia dla rąk i stóp mogą zostać złożone kiedy winda nie jest w użyciu, aby udostępnić większy obszar schodów pozostałym użytkownikom.

Windą można wtedy sterować przy pomocy pilota.

## PARKOWANIE I ŁADOWANIE

Kiedy krzeselko nie jest używane, istotne jest, aby było ono zaparkowane we właściwym miejscu na szynie.

Zależy to od typu toru, jaki Państwo posiadają. Transformator powinien być **NA STAŁE** podłączony do sieci.

Na **STANDARDOWYM TORZE** właściwe pozycje to góra i dół szyny, gdzie krzeselko zatrzymuje się automatycznie. W tych miejscach urządzenie otrzymuje prąd z sieci głównej, co pozwala na ładowanie wewnętrznych baterii.


Krzeselko wyda pojedynczy sygnał kiedy osiągnie punkt ładowania.



## ODŁĄCZANIE ZASILANIA


Jeżeli krzeselko nie będzie używane przez dłuższy okres czasu (np. wakacje), radzimy odłączyć je od głównego zasilania.

Należy przestrzegać poniższej procedury, aby uniknąć uszkodzenia baterii, które nie jest objęte gwarancją producenta.

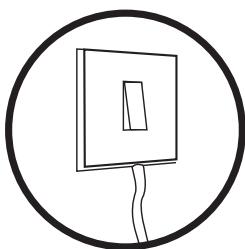

### 1. ODŁĄCZ TRANSFORMATOR OD SIECI GŁÓWNEJ

(krzeselko będzie wydawało ciągły sygnał, oznaczający brak ładowania).

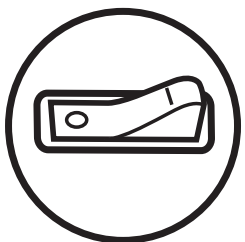

### 2. WYŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK BATERII NA WAGONIKU

- POZYCJA „OFF” (znajduje się on obok stacyjki z kluczem oraz wyświetlacza cyfrowego).

Wyłączając przełącznik baterii na wagoniku, odłącza się wewnętrzne baterie, chroniąc je przed rozładowaniem.

## KIEDY WINDA NIE DZIAŁA

Skontaktuj się ze swoim dealerem ACORN:

Pieczętka dealera ACORN

# ZABEZPIECZENIA

Krzeselko posiada następujące zabezpieczenia:

## **Czujniki bezpieczeństwa wagonika, górny i dolny.**

Zatrzymują windę w przypadku napotkania przeszkody na szynie.

## **Czujniki bezpieczeństwa podnóżka, górny i dolny.**

Zatrzymują windę w przypadku napotkania przeszkody na schodach.

## **Wyłącznik obrotowego siedzenia.**

Winda nie ruszy, jeśli krzeselko nie jest w pozycji bezpiecznej do jazdy.

## **Krańcowy limit trasy.**

Zatrzymuje windę w bezpiecznej pozycji.

## **Regulator szybkości.**


Wyklucza ryzyko niekontrolowanego zjazdu.

## **Ostrzeżenie o braku ładowania.**

Sygnal ostrzeżenia.




Jeżeli jeden lub więcej czujników bezpieczeństwa zostało uaktywnionych, cyfrowy wyświetlacz autodiagnostyczny wyświetli odpowiedni kod usterki. Kody te, wraz z podaniem rozwiązania problemu, znaleźć można w rozdziale Kody Cyfrowe.

## REGULATOR SZYBKOŚCI


Krzeselko posiada wbudowany regulator szybkości (OSG), który unieruchomi krzeselko na szynie w razie mechanicznej usterki lub nadmiernej szybkości. Regulator szybkości może również zostać uaktywniony silnym uderzeniem lub drganiami. Cyfrowy wyświetlacz pokaże wtedy nr . W takiej sytuacji można przewinąć krzeselko ręcznie, aby je zresetować.

## PRZEWIJANIE RĘCZNE

Aby poprawnie przewinąć krzeselko, należy działać według instrukcji.

1. Wyłączyć przełącznik baterii.
2. Wyjąć zawleczkę i włożyć rączkę do przewijania na biegun silnika.
3. Kręcić rączką do przewijania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż urządzenie przemieści się o około trzy centymetry
4. Wyjąć rączkę do przewijania i włączyć przełącznik baterii.
5. Sprawdzić, czy wyświetlacz cyfrowy zmienił numer z  na . Jeżeli wciąż pokazuje nr , należy powtórzyć kroki od 1 do 4.
6. Sprawdzić, czy winda jest w stanie poruszać się normalnie po całym torze. Włożyć zawleczkę na miejsce.













### UWAGA!

Nigdy nie używaj krzeselka z rączką do przewijania tkwiącą w windzie, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia. Nigdy nie przewijaj ręcznie krzeselka w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, gdy wyświetlacz cyfrowy pokazuje nr . Rezultatem może być uszkodzenie regulatora szybkości (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z konsultantem ACORN).

# KODY CYFROWE


KOD	WADA	ROZWIĄZANIE
	BRAK ZASILANIA (brak kodu)	 Sprawdź czy przełącznik jest w pozycji "on"
	STAN NORMALY	 Jeżeli joystick jest wadliwy, spróbuj pilota. Jeśli winda nie działa, wciśnięty może być wyłącznik limitu.
	NIE ŁADUJE	 Transformator nie jest podłączony lub krzesło nie jest na punkcie ładowania. Numerowi na wyświetlaczu towarzyszy sygnał ostrzeżenia.
	O.S.G. - REGULATOR SZYBKOŚCI (zobacz ręczne przewijanie)	 Przewiń krzesło w górę, aby zresetować O.S.G.
	SIEDZENIE NIEZABLOKOWANE	 Przetaw siedzenie do pozycji jazdy. Opuść drążek oparcia (jeśli jest zainstalowany).
	KLUCZ	 Sprawdź, czy klucz jest w stacyjce i czy jest przekręcony w prawo.
	PRZEKROCZONY LIMIT TRASY	Przewiń krzesło w górę lub w dół
	DOLNA KRAWĘDŹ PODNOŻKA	 Dolna krawędź bezpieczeństwa została uaktywniona. Sprawdź dolną i spodnią krawędź bezpieczeństwa.

## KODY CYFROWE

KOD	WADA	ROZWIĄZANIE
	GÓRNA KRAWĘDŹ PODNÓŻKA	 Górna krawędź bezpieczeństwa została uaktywniona.
	GÓRNY CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA	Górny czujnik bezpieczeństwa na wagoniku został uaktywniony
	DOLNY CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA	Dolny czujnik bezpieczeństwa został uaktywniony.
	BATERIE	 Baterie są wyczerpane. Pozostaw krzeselko na około jedną godzinę w pukcie ładowania.
	HAMULEC	 Wada hamulca. Spróbuj zresetować. Możliwe, że winą są słabe baterie. Spróbuj je doładować.
	SILNIK	 Spróbuj zresetować. Jeśli to nie pomoże, potrzebna będzie wizyta konsultanta. Aby zresetować ustaw przełącznik mocy na krzeselku na pozycję „off” i poczekaj 30 sekund.
	BATERIE	Słabe baterie (17 voltów lub mniej). Doładuj baterie.
	WADA PRZEKAŹNIKA	 Spróbuj zresetować, jeśli wyświetlacz nadal pokazuje ten symbol, a winda nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze swoim dealerem.

# UTRZYMANIE I KONSERWACJA

## PILOTY




Jak wcześniej opisano, działanie pilota może zakłócić częstotliwość zewnętrzna. Jeżeli tak się stanie, należy zresetować pilota: ześlij krzeselko na dół szyny, następnie obróć siedzenie tak, aby wyświetlacz pokazał numer . Naciśnij joystick do dołu (mimo tego, że krzeselko nie może zjechać już niżej), w tym samym czasie naciskając czerwony przycisk pilota przez około 5 sekund. Po ustawieniu siedzenia w poprawnej pozycji jazdy, pilot powinien działać normalnie.

## SZYNA

Zalecane jest czyszczenie szyny raz w tygodniu. Powinno być to zrobione suchą szmatką (można użyć zwykłego środka czyszczącego w sprayu). **POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO UŻYWAĆ WILGOTNEJ SZMATKI LUB PAPIERU ŚCIERNEGO.** Nie czyszczenie szyny spowoduje osadzenie się dużej warstwy kurzu na rolkach krzeselka.

Zalecane jest również regularne odkurzanie prowadnicy zębatkowej.

## KRAWĘDZIE BEZPIECZEŃSTWA

Czasami krzeselko nie działa, wyświetlając numer ,  lub literkę , ponieważ jedna z krawędzi bezpieczeństwa mogła zostać zablokowana. Problem ten można rozwiązać przez delikatne naciśnięcie odpowiedniej krawędzi. Jeśli jednak to nie poskutkuje, należy skonsultować się z przedstawicielem ACORN.

## PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot działa używając niewidzialnego źródła światła. Podobna częstotliwość jest emitowana przez niektóre żarówki energooszczędne. W takim przypadku radzimy wymienić żarówkę na zwykłą.

## INNE


Jeżeli krzeselko wydaje pojedynczy sygnał (około jednego na minutę) sprawdź, czy przyczyną nie jest alarm przeciwpożarowy, który wydaje sygnał ostrzeżenia o słabej baterii.

## RESETOWANIE

W nielicznych przypadkach może być konieczne zresetowanie panelu kontrolnego windy. W tym celu przełącznik wyłączeniowy na pozycję „off”, pozostaw na 30 sekund i włącz ponownie.



## DIAGRAM OKABLOWANIA

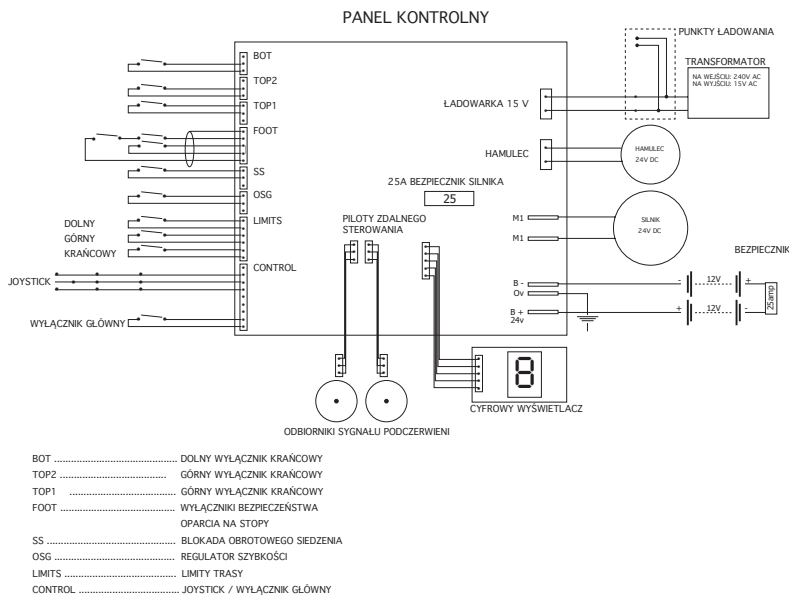

Telecom House  
 Millennium Business Park  
 Station Road  
 Steeton  
 West Yorkshire  
 BD20 6RB  
 UNITED KINGDOM  
[www.acornstairlifts.pl](http://www.acornstairlifts.pl)

Wszelkie szczegóły podane w instrukcji obsługi mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje zawarte w instrukcji obsługi mogą różnić się nieznacznie od prawdziwego produktu.

