


ACORN

CADEIRA-ELEVADOR

MUITO OBRIGADO

Obrigado por escolher a ACORN. Você poderá descansar assegurado de que sua Cadeira Elevador fornecerá vários anos de serviço e confiança e permitirá que você aprecie por completo sua casa.

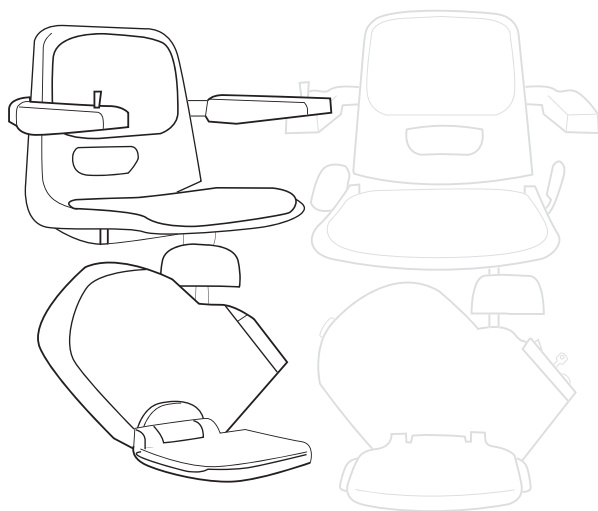

Sua cadeira elevador está coberta por uma garantia de fábrica durante 24 meses, que cobre todo o custo para as peças de reposição (entretanto, os problemas em consequência do mau uso do equipamento, não estarão cobertos pela garantia).

Sua cadeira elevador foi projetada e manufaturada por peritos sob os padrões mais elevados. A manutenção regular é requerida para assegurar um serviço seguro e isento de problemas.


Antes de usar sua cadeira elevador, por favor leia estas instruções com atenção

A CADEIRA ELEVADOR

A **ACORN Superglide** é uma cadeira elevador elétrica operada e projetada para o uso doméstico. Se usada corretamente, fornecerá vários anos de serviço e confiança. A cadeira foi projetada para carregar uma pessoa, pesando não mais do que 127kg.

A **ACORN Superglide** é alimentada por um conjunto interno de baterias carregadas pela tomada normal, através de um transformador que reduz a voltagem da corrente elétrica a um nível seguro. Isto significa que não há nenhum perigo de choque elétrico e também que a cadeira continuará funcionando mesmo se a eletricidade da casa seja interrompida.

- 1 Braços dobráveis
- 2 Painél de Diagnóstico
- 3 Controle por Joystick
- 4 Alavanca para girar o assento
- 5 Chave Interruptora
- 6 Assento dobrável
- 7 Sensor de segurança inferior
- 8 Interruptor de isolação da bateria
- 9 Superfície anti-derrapante para os pés
- 10 Apoio dos pés dobrável
- 11 Sensor de segurança superior
- 12 Cinto de segurança
- 13 Sensores infra-vermelho

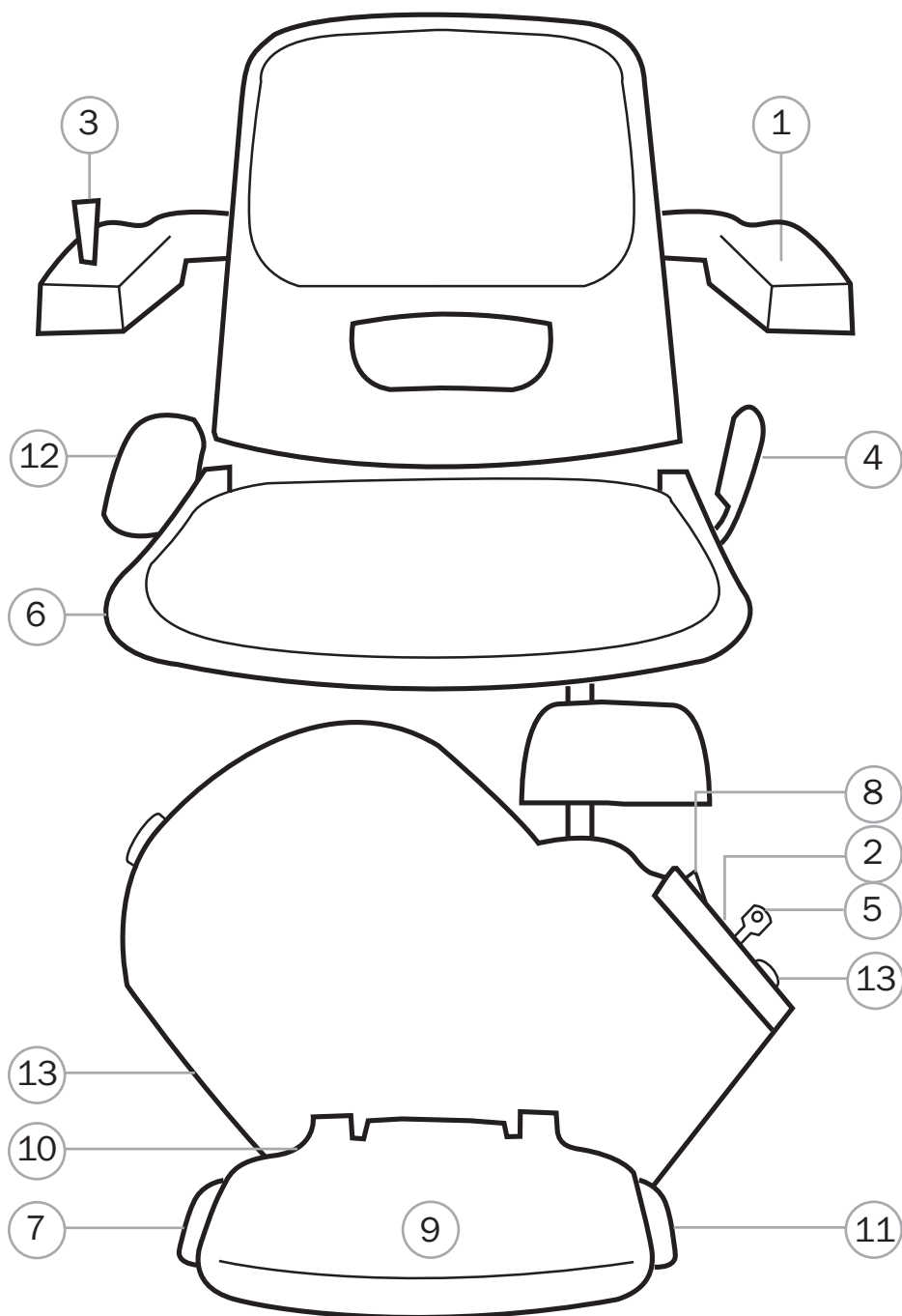

CONSELHOS GERÁIS DE SEGURANÇA

- Assegure-se de que a escada não esteja sendo usada por outro e esteja desobstruída antes de usar a cadeira elevador.
- Relaxe e sente-se apoiado no assento com seus braços e pés encostados nos devidos lugares.
- Se sua cadeira tiver um cinto de segurança, prenda-o firmemente.




Atenção! A cadeira elevador foi projetada para carregar apenas uma pessoa de cada vez. Nunca tente levar mais de uma pessoa.


Atenção! Não permita que as crianças brinquem com a cadeira. O uso por crianças deve ser sempre supervisionado. Para sua segurança, é aconselhável desligar a cadeira e remover a chave, se houver o risco de crianças brincando.



Assegure-se de que outros membros de sua casa ou visitas estejam cientes de que a cadeira se encontra fora de todos os potenciais perigos. Assegure-se de que os animais de estimação estejam fora de perigo, antes de usar a cadeira elevador.

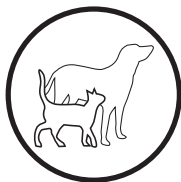

Atenção! Assegure-se de que não haja nenhum artigo de roupa que poderia se enroscar no mecanismo da cadeira, porque isto poderia resultar em ferimento pessoal ou danos ao equipamento. Certifique-se sempre que sua roupa esteja fora de alcance do trilho ou da carruagem antes de usar a cadeira.

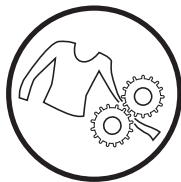


Atenção! É possível que artigos pequenos possam cair no trilho da cadeira elevador, qual poderia então deslizar abaixo do trilho e entrar no mecanismo da cadeira elevador. Se você suspeitar que algum objeto possa estar preso no equipamento, consulte seu representante da ACORN, antes de usar a cadeira novamente.

AVISO! Para desconectar a fonte de alimentação do sistema da cadeira, retire o transformador da parede também desligue o interruptor de isolamento (8) da unidade da carruagem para impedir o esgotamento da bateria.


OPERAÇÃO


CHAVE INTERRUPTORA

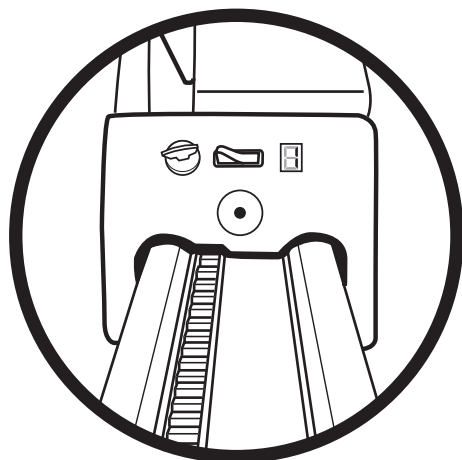



Você encontrará a chave interruptora na tampa da carruagem.

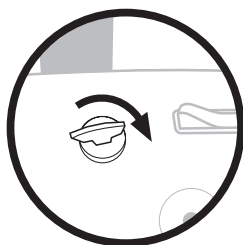Para que a unidade opere, a chave deve estar dentro e virada para a direita (no sentido horário)




O painel de diagnóstico, posicionado ao lado da chave, indicará .

Se o painel não estiver indicando o N°  por favor verifique os códigos nas páginas 125 e 126.

Entretanto quando a chave estiver girada para a esquerda ou retirada, o painel de diagnóstico mostrará o N°  e a unidade não funcionará.

A chave pode também ser removida para impedir todo o uso desautorizado.

Isto não afetará a carga.

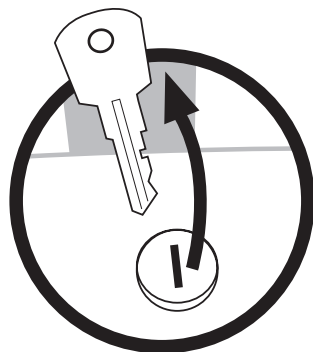

ACORN Manual do Usuário


JOYSTICK

O Joystick se encontra situado no braço da cadeira.

Para operar a unidade o Joystick deve ser pressionado e mantido no sentido desejado do curso.

Haverá um bip audível para sinalizar que o comando foi recebido.

A unidade funcionará somente quando o Joystick estiver pressionado e parará automaticamente quando a unidade alcançar a extremidade do percurso ou se o Joystick for liberado.

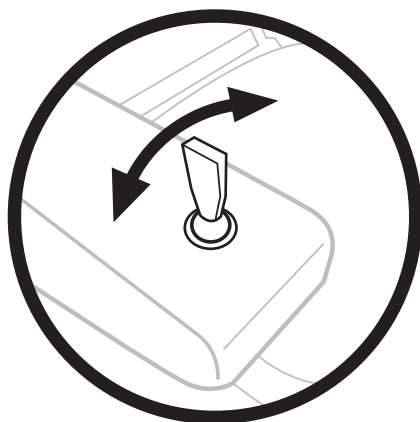

Se um bip não puder ser ouvido quando o Joystick estiver pressionado, verifique o código à mostra e consulte a seção de códigos de diagnósticos

CONTROLES REMOTOS



A unidade também pode ser operada através do controle remoto. Há duas teclas no controle remoto.


Para enviar a unidade no sentido ascendente basta apenas pressionar o botão vermelho. Para descê-lo pressione o botão verde. A unidade parará automaticamente na extremidade do trilho ou se o botão for liberado.

A unidade poderá funcionar com os braços do assento, o assento ou o apoio dos pés na posição dobrada. Entretanto, a cadeira não funcionará se o assento estiver virado (ou um dos braços de segurança levantado). Isto será indicado pelo N° 4 no painel de diagnóstico.

Uma interferência ocasional de fontes exteriores pode em alguns casos fazer com que o elevador pare. Esta é uma característica normal para impedir a operação acidental. A tecla do controle remoto terá que ser então liberada e pressionada outra vez.

Recomenda-se que a bateria do controle remoto seja trocada cada 6 meses.

ASSENTO GIRATÓRIO

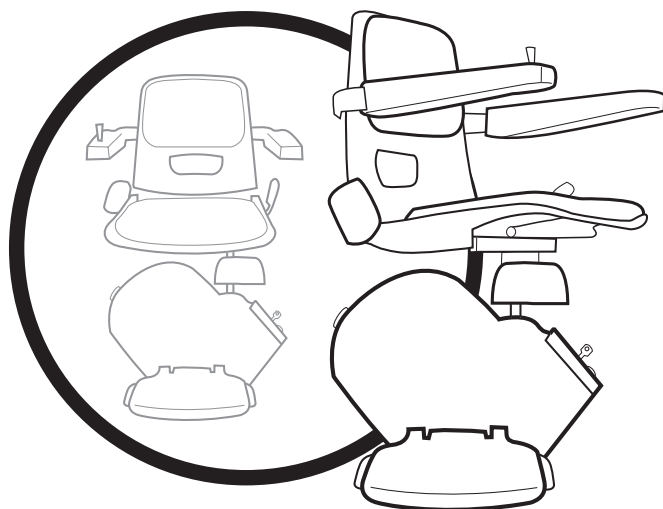



Quando a unidade alcançar a extremidade superior do trilho a cadeira parará automaticamente.

O assento pode ser agora girado para fazer a saída para fora da cadeira ainda mais fácil.

Para girar o assento pressione e mantenha abaixada a alavanca na lateral do assento.


Isto permitirá então que o assento seja girado para estar de frente do patamar. O assento travará em 45° e em 90° da posição de curso.

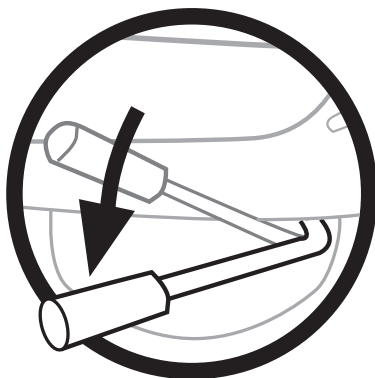

Quando a alavanca estiver liberada, entretanto a unidade não viajará quando o assento estiver virado, indicando o N°  no painel de diagnóstico.

Por favor tenha em conta que o apoio dos pés não gira e o assento somente pode ser virado no alto das escadas.

CINTO DE SEGURANÇA

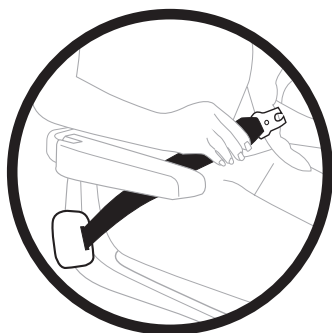


Para prender o cinto de segurança, retire a correia e introduza o gancho na fivela. Um clique (positivo) deve ser ouvido indicando que o gancho do cinto se acoplou corretamente.

Para liberar o cinto de segurança, segure a correia com uma mão e pressione a tecla de liberação na fivela. O gancho liberará automaticamente e permitirá que a correia se retraia.



É importante que a correia esteja bem segura quando retirar o cinto, de outra maneira o cinto se encolherá rápido como uma chicotada e poderá causar algum ferimento.

ASSENTO E APOIO DOS PÉS DOBRÁVEIS

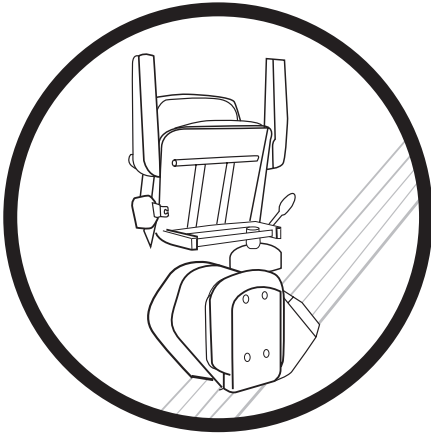

O assento, os braços e o apoio dos pés podem ser dobrados para cima quando não estiverem em uso. Permitindo um acesso mais amplo para a escadaria também para o seu corredor.

O elevador pode ser operado através dos controles remotos.

ESTACIONAMENTO/RECARREGAR

Quando não estiver em uso, é de vital importância que a unidade esteja estacionada na posição correta do trilho.

Isto dependerá do tipo de trilho. A fonte elétrica do trilho deve estar ligada permanentemente.


Em um TRILHO PADRÃO as fontes de carga estão no alto ou na parte de baixo, onde a unidade pára automaticamente. Nestas posições a unidade recebe uma fonte de alimentação dos pontos principais que permite que a unidade recarregue suas baterias internas.



O elevador fará um único bip para indicar que o ponto de carga foi alcançado.


DESCONECTANDO A FONTE

Se a unidade não for usada por um período de tempo considerável (feriados etc.), você poderá desconectar a unidade da fonte (tomada) principal. O seguinte procedimento deve ser seguido para evitar a falha da bateria que não está coberta pela garantia do fabricante.

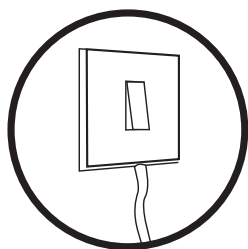

1. Desligue o Transformador da Tomada (a unidade fará agora um bip constante, o aviso de não recebimento de carga)

2. Desligue a isolação da bateria da carruagem (localizado ao lado da chave e do painel de diagnóstico da carruagem)

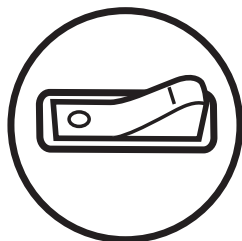

Desligando o interruptor de isolação as baterias internas são desconectadas, impedindo que se descarreguem.

O ELEVADOR NÃO FUNCIONA

Contate por favor seu representante da ACORN para um auxílio adicional:
Coloque o selo do representante da ACORN aqui



CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

A cadeira elevador ACORN vem com uma variedade de características de segurança incluídas no modelo padrão.

Estão incluídas:

Placas de segurança da carruagem, superior e inferior.

Detém a unidade se houver contato com alguma obstrução no trilho.

Placas de segurança do apoio dos pés, superior e inferior.

Detém a unidade se houver contato com alguma obstrução na escadaria.

Alavanca do assento giratório.

Impede o movimento acidental da cadeira se o assento estiver virado.

Rampa de limite final.

Impede o curso excedente.

Regulador de velocidade excedente e engrenagem de segurança.

Impede uma descida descontrolada.


Aviso de não recebimento de carga.

Som de advertência audível (Bip).

Se um ou mais dos dispositivos de segurança forem ativados, um código apropriado será indicado no painel de exposição.

Estes códigos podem ser encontrados na seção de DIAGNÓSTICOS junto com a ação apropriada a ser tomada.




REGULADOR DE VELOCIDADE


O elevador foi projetado com um dispositivo de segurança (o.s.g.) que travará o elevador em caso de uma falha mecânica ou de uma velocidade excessiva. Se o o.s.g se ativar involuntariamente devido a um choque ou alguma vibração excessiva, indicado pelo N°  no painel de diagnóstico, é possível destravar o elevador com a manivela para recomençar outra vez o percurso.

MANIVELA (DESTRAVAR A CADEIRA)
















Para destravar a cadeira elevador, o seguinte passo deve ser tomado.

AVISO! Ao utilizar a manivela observe sempre se existem possíveis obstruções.














1. Desligue o interruptor de isolamento da bateria.
2. Remova a tampinha branca (parte de cima do motor) e introduza a manivela no eixo do motor.
3. Gire o enrolamento do motor no sentido horário fazendo que o elevador mova para cima do trilho aproximadamente 3 cm.
4. Remova a manivela do enrolamento e ligue novamente o interruptor de isolamento da bateria.
5. Repare se o painel de diagnóstico digital mudou de  para . Se ainda mostrar o N°  repita as etapas de 1 a 4.
6. Envie o elevador para cima e para baixo até que pare automaticamente, para verificar se todas as operações estão funcionando como deveriam. Recoloque a tampinha branca.

CUIDADO! Nunca utilize o elevador com a manivela encaixada no eixo, porque isso poderia resultar em ferimento pessoal ou danos graves ao aparelho. Nunca gire a manivela do elevador no sentido anti-horário se o código de falha aparecer () porque isto resultaria em danos ao o.s.g. (qualquer dúvida entre em contato com o seu representante da ACORN para conselhos técnicos).

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DIGITAL


NÚMERO	FALHA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
	DESLIGADA (NENHUMA EXPOSIÇÃO)	 <p>Certifique-se de que o interruptor está ligado na posição de ON.</p>
	NORMAL	 <p>Se houver uma falha no Joystick, tente usar o controle remoto. Um dos interruptores de limite pode estar agarrado por dentro.</p>
	NENHUMA CARGA	 <p>A tomada foi desligada ou o elevador não está no ponto de carga. Haverá também um apito de advertência audível.(Bip)</p>
	O.S.G. (VEJA: MANIVELA)	 <p>Dê corda com a manivela no elevador até recomear o O.S.G.</p>
	ASSENTO VIRADO	 <p>Gire o assento para a posição correta do CURSO. O braço de segurança pode não estar para baixo.</p>
	CHAVE FORA	 <p>Certifique-se de que a chave esteja dentro e girada no sentido horário.</p>
	LIMITE FINAL	<p>Ultrapassar a rampa de limite. Use a manivela do elevador para levar a cadeira para cima ou para baixo.</p>
	PLACA INFERIOR DO APOIO DOS PÉS	 <p>A borda inferior de segurança está ativada. Verifique a borda inferior de segurança. Verifique o interruptor abaixo do apoio dos pés.</p>

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DIGITAL

NÚMERO	FALHA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
	PLACA DE SEGURANÇA SUPERIOR DO APOIO DOS PÉS	 Placa de segurança superior do apoio dos pés ativada
	PLACA DE SEGURANÇA SUPERIOR.	Placa de segurança superior ativada
	PLACA DE SEGURANÇA INFERIOR	Placa de segurança inferior ativada.
	BATERIAS	 As baterias estão esgotadas. Deixar no ponto de carga por aproximadamente 1 hora.
	FREIO	 Falha do freio. Tente reiniciar a cadeira. As baterias estão possivelmente baixas. Deixe recarregando por uma hora.
	MOTOR	 Tente reiniciar a cadeira. Se isto não funcionar, você precisará da visita de um representante. Para reiniciar, desligue o interruptor localizado fora da cadeira por 30 segundos (veja página 128).
	BATERIAS	 Baterias fracas, recarregar as baterias (17 volts ou menos).
	FALHA DO SISTEMA ELÉTRICO	Tente reiniciar a cadeira, se isto funcionar e o elevador não operar, chame seu representante para instruções adicionais.

CUIDADO & MANUTENÇÃO

CONTROLE REMOTO

Como previamente descrito, pode haver ocasiões onde os controles perderão a programação devido à interferência exterior. Se isto acontecer você poderá restaurar seu controle remoto enviando a carruagem ao princípio do trilho. Gire então o assento de modo que a indicação digital esteja mostrando o N° . Pressione o Joystick no braço da cadeira na posição descendente (mesmo que a cadeira não desça mais) ao mesmo tempo pressione a tecla vermelha no controle remoto por aproximadamente 5 segundos. Quando o assento retornar para a posição correta os controles remotos estarão reprogramados corretamente.




TRILHOS

Recomenda-se que o trilho deve ser limpo semanalmente. Isto deve ser feito com um pano seco e você poderá usar um lustrador comum para a casa.

Sob **NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA** você deve usar um **PANO ÚMIDO** ou **ABRASIVO**.

Deixar de limpar o trilho regularmente poderá causar acúmulo de poeira nos rolos internos do elevador, qual deixará por sua vez marcas pretas e em alguns casos, deixará resíduos parecendo arranhões sobre o trilho. Recomenda-se também que aspire a cremalheira, montada no trilho, regularmente.

BORDAS DE SEGURANÇA

Se a cadeira elevador não estiver operando (indicando ,  ou ) isto poderia ser devido a uma das placas de segurança que estejam acionadas. Isto pode ser resolvido simplesmente pressionando delicadamente a placa de segurança. Se isto não retificar o problema, entre em contato com o seu representante da ACORN.

CONTROLES REMOTOS

Os controles remotos infravermelhos funcionam através de uma fonte de luz invisível. Esta fonte de luz natural pode também ser emitida por determinados tipos de lâmpadas econômicas. Se você reparar que tal lâmpada está causando a interferência nos controles, recomenda-se que as troque por uma lâmpada padrão.

OUTRO

Se a cadeira elevador apitar uma vez em um ciclo regular (aproximadamente uma vez cada minuto) certifique-se de que isto não seja devido a um alarme de incêndio que esteja dando um aviso de bateria fraca.

REINICIAR A CADEIRA


Em determinadas ocasiões pode ser necessário reiniciar a placa de comando do elevador.



Desligue a cadeira, deixe por 30 segundos, e ligue outra vez. Isto reiniciará os códigos de diagnósticos no painel.

DIAGRAMA DA FIAÇÃO

Todos os detalhes dados nestas instruções estão sujeitos à mudança. As ilustrações contidas nestas instruções podem variar ligeiramente do produto real.

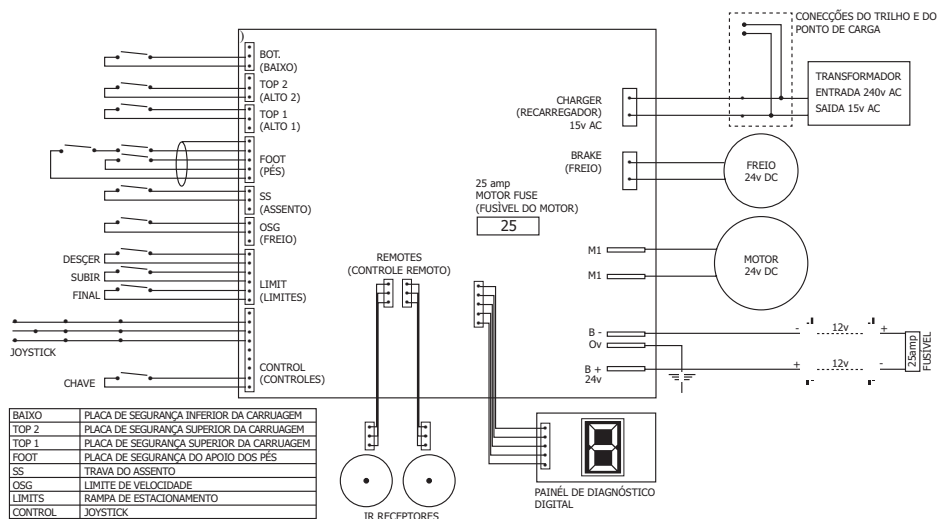

Telecom House
Millennium Business Park
Station Road
Steeton
West Yorkshire
BD20 6RB
UNITED KINGDOM

info@acornstairlifts.com
www.acornstairlifts.com

Todos os detalhes dados nestas instruções estão sujeitos à mudança.

As ilustrações contidas nestas instruções podem variar ligeiramente do produto real.

